



Contour[®] plus ONE[»]

Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

Veresuhkru mõõtmise meeldetuletuste sisse seadmine **Contour Diabetes rakenduse abil**




Enne raviplaani, toitumisharjumuste või treeningplaani
muutmist konsulteerige alati eelnevalt arstiga.



**Contour[®]
plus ONE[™]**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

Meeldetuletusplaanid

võimaldavad vere glükoositaseme mõõtetulemustest paremat ülevaadet saada.

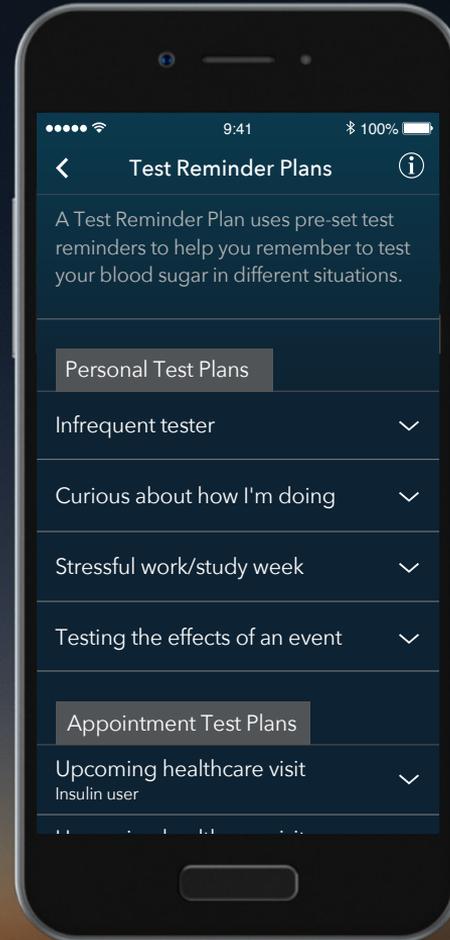


Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

1.

Meeldetuletusplaan


Meeldetuletusplaani valimiseks
valige peamenüüst
“**Main Menu**” alammenüü
“**My Reminders**” ja toksake +

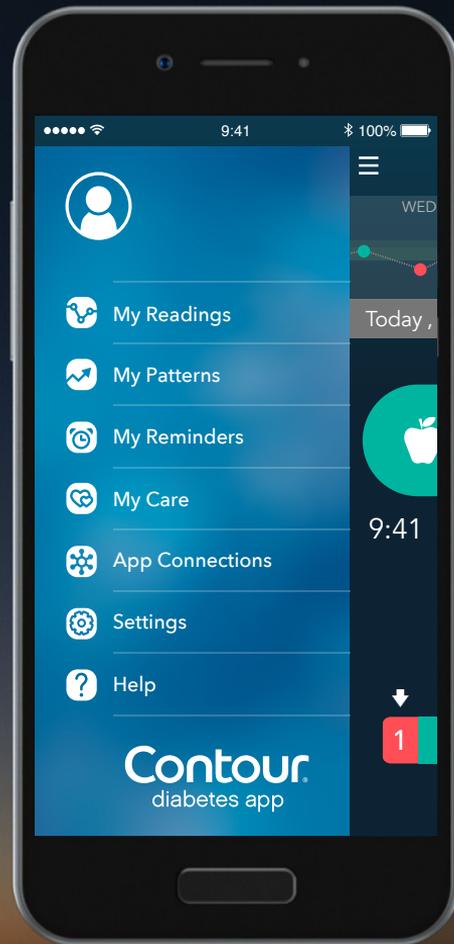

Contour[®]
plus ONE[™]
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

1. Meeldetuletusplaan


Meeldetuletusplaani valimiseks
valige peamenüüst
“**Main Menu**” alammenüü
“**My Reminders**” ja toksake +

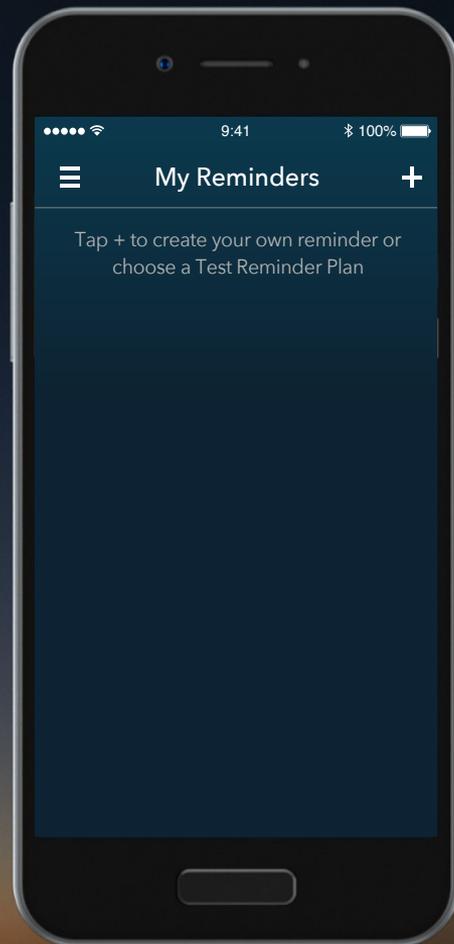

Contour[®]
plus **ONE**[™]
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

1. Meeldetuletusplaan


Valige **“Test Reminder Plan”**,
et luua meeldetuletusplaan

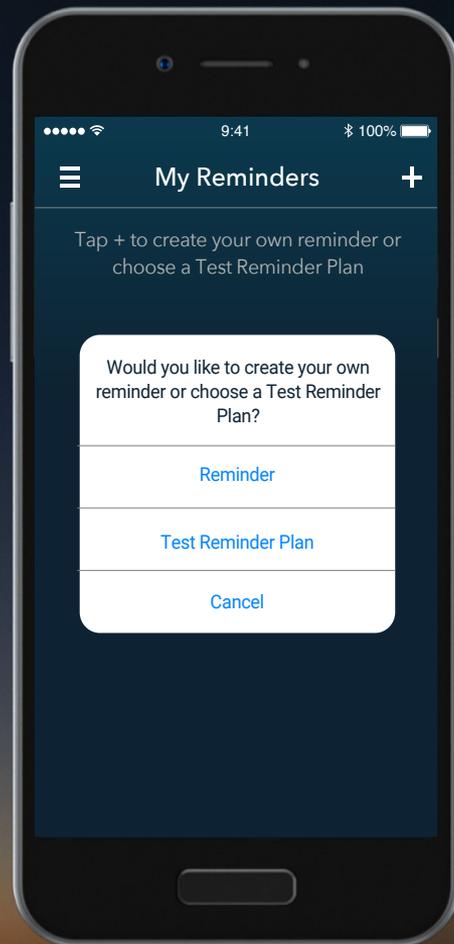

Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

2. Meeldetuletusplaan

Valige teile sobilik
meeldetuletusplaan.

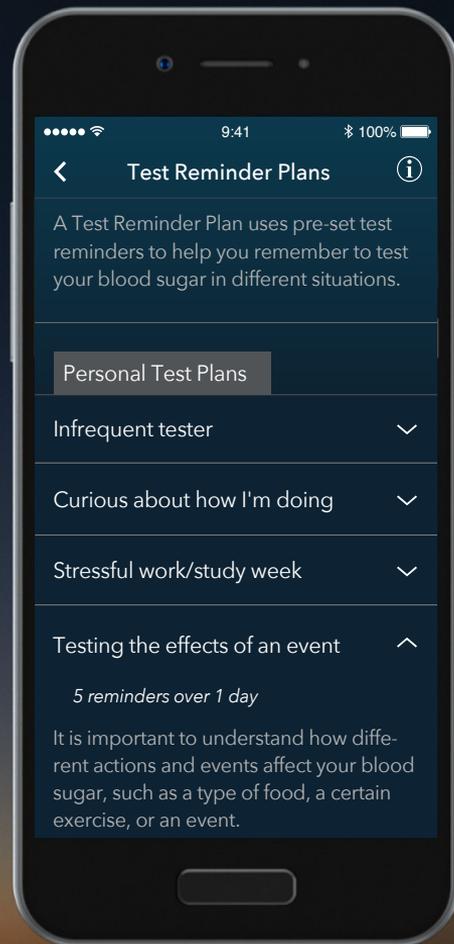


Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

2. Meeldetuletusplaan

Valige teile sobilik
meeldetuletusplaan.

Toksates nimetuse kõrval
olevale noolele avaneb antud
plaani kohta lisainfo.

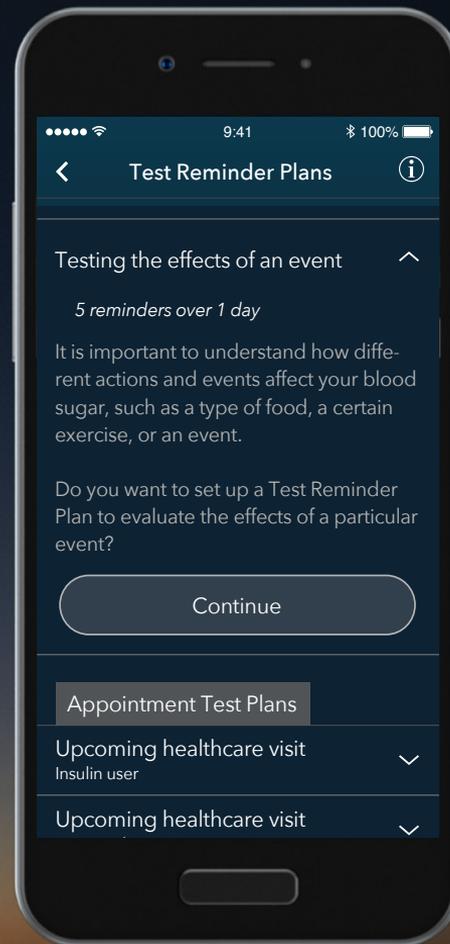


Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

2. Meeldetuletusplaan

Valige teile sobilik
meeldetuletusplaan.

Toksates nimetuse kõrval olevale
noolele avaneb antud plaani kohta
lisainfo.


Valitud **meeldetuletusplaani**
seadistamiseks toksake
“Continue”.

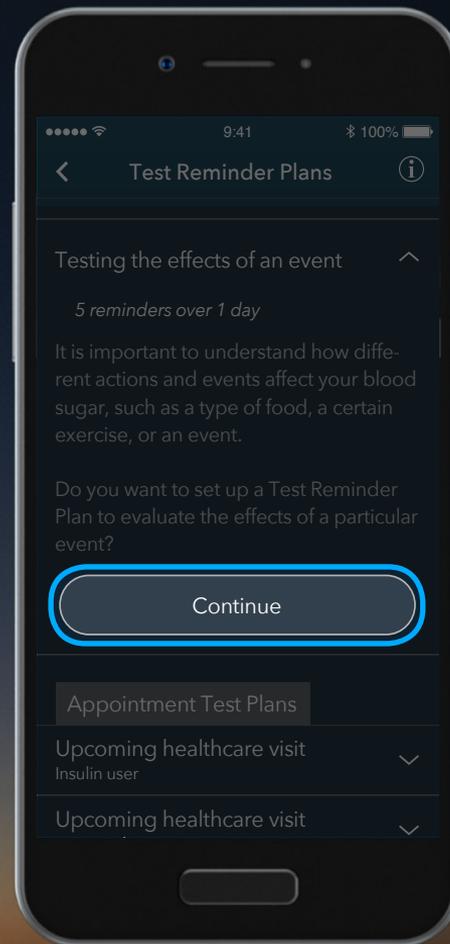

Contour[®]
plus **ONE**[»]
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

3. Meeldetuletusplaan


Toksake kuupäeval ja kellaajal, et seadistada teie poolt valitud sündmuse kellaeg ja kuupäev.

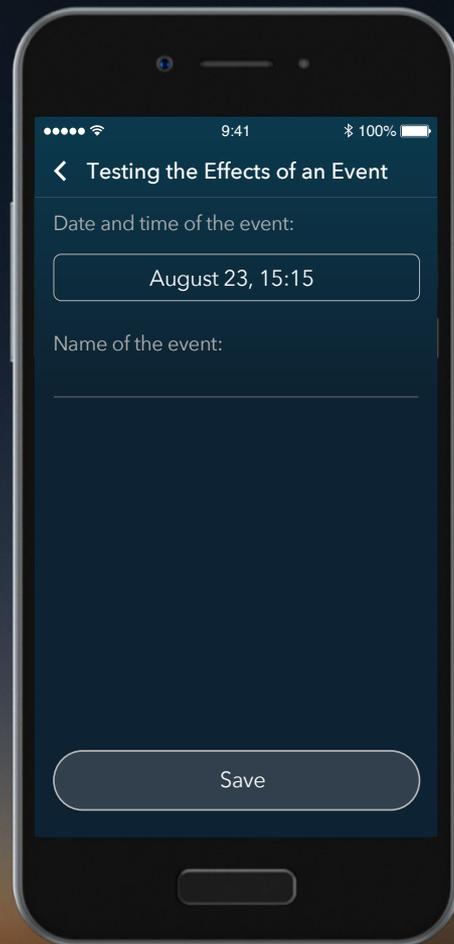

Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

3. Meeldetuletusplaan


Toksake kuupäeval ja kellaajal, et seadistada teie poolt valitud sündmuse kellaeg ja kuupäev.

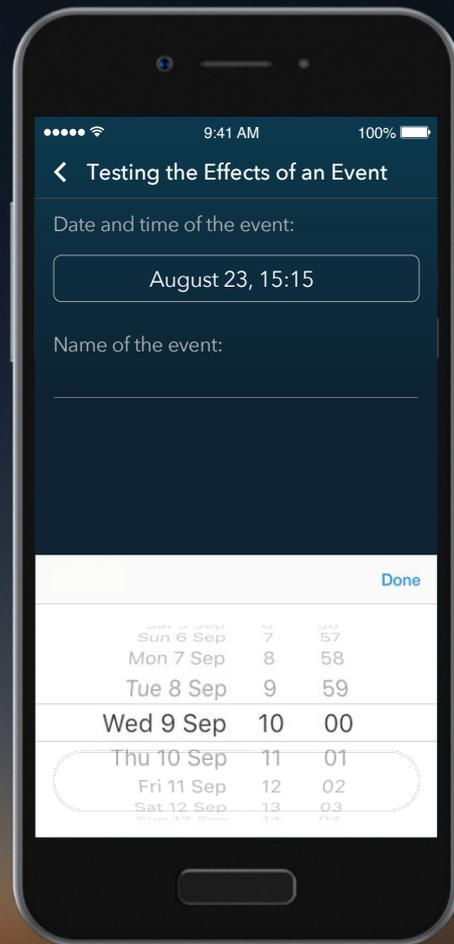

Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

3. Meeldetuletusplaan

Sündmusele nimetuse sisestamiseks toksake ribal “Event Name”.

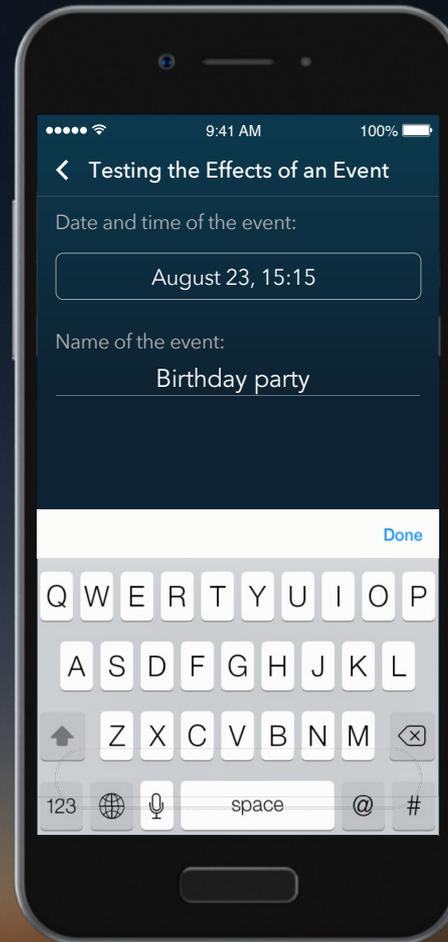


Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

3.

Meeldetuletusplaan

Salvestamiseks toksake **“Save”**.

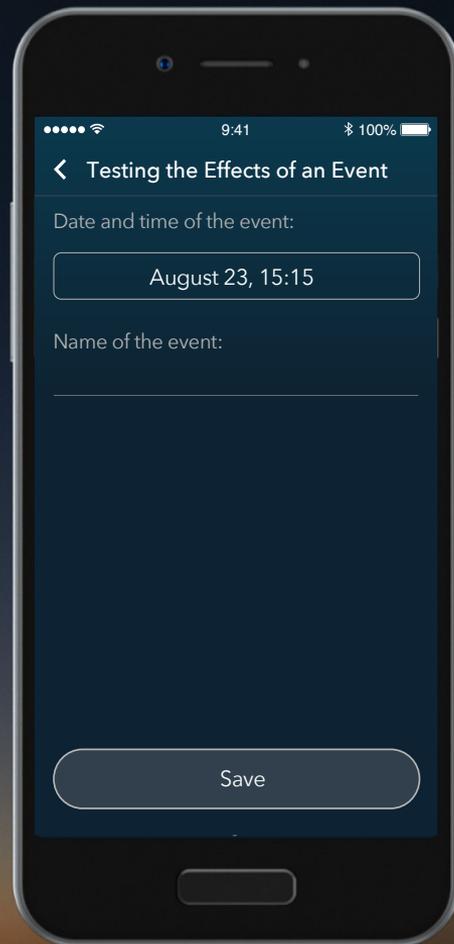


Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

3. Meeldetuletusplaan

Salvestamiseks toksake **“Save”**.

Teie **meeldetuletusplaan** on nüüd aktiveeritud.

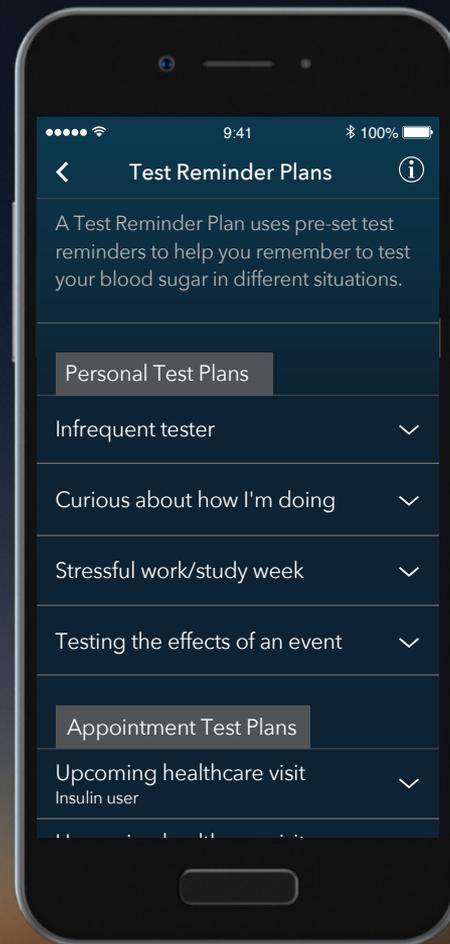

Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

Kui teil tekib küsimusi **CONTOUR PLUS ONE** nutika glükomeetri või Contour Diabetes rakenduse kohta, siis konsulteerige arstiga. Lsainfot toodete kohta leiate kasutusjuhendist.

Lisainfot toodete ja nende kättesaadavuse kohta teie riigis leiate veebiaadressilt **diabetes.ascensia.com**.




Esitatud patsiendiandmed on näitlikud. Konsulteerige alati perearstiga enne raviplaani, toitumis- või treeningharjumuste muutmist.



Apple ja Apple logo on Ameerika Ühendriikides ja mujal registreeritud Apple Inc. kaubamärgid. Apple Store on Apple Inc. registreeritud teenusmärk.

Bluetooth sõnatähis ja logo on Bluetooth SIG Inc. registreeritud kaubamärgid, mille kasutamine on litsentseeritud. Google Play ja Google Play logo on Google Inc. registreeritud kaubamärgid.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logo ja Contour on Ascensia Diabetes Care Holdings AG registreeritud kaubamärgid.

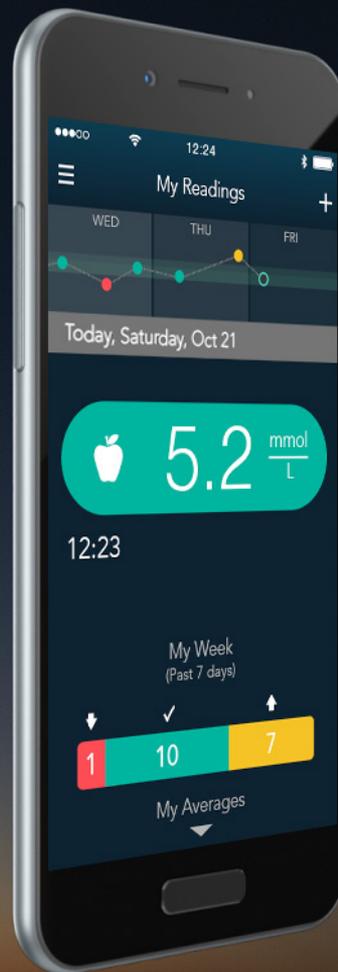

Contour
plus ONE
Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

diabetes.ascensia.com



Contour[®]

diabetes solutions