




Contour[®] plus ONE[»]

Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

CONTOUR DIABETES mobiilirakenduse “My Patterns” näidumustrite funktsiooni kasutamine.




Enne raviplaani, toitumis- ja treeningharjumuste muutmist
konsulteerige alati eelnevalt arstiga.

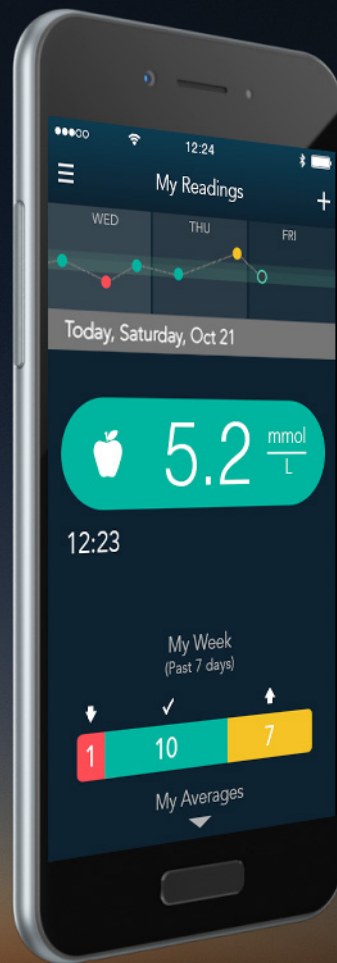


Contour[®]
plus **ONE**[®]
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

“My Patterns” funktsioon
tuvastab teie veresuhkrunäitude
mustreid ja seaduspärasusi ja
teavitab teid nende võimalikest
tekkepõhjustest.

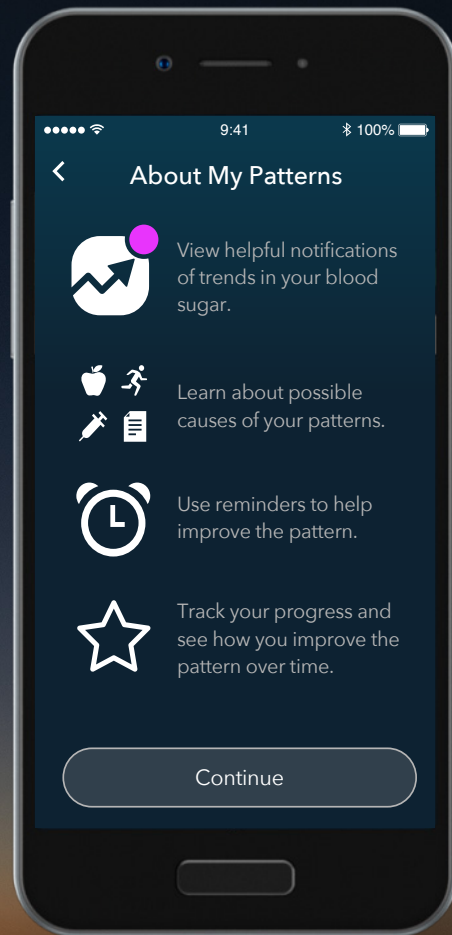

**Contour[®]
plus ONE[™]**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem


“My Patterns” funktsioon
tuvastab teie veresuhkrunäitude
mustreid ja seaduspärasusi ja
teavitab teid nende võimalikest
tekkepõhjustest.

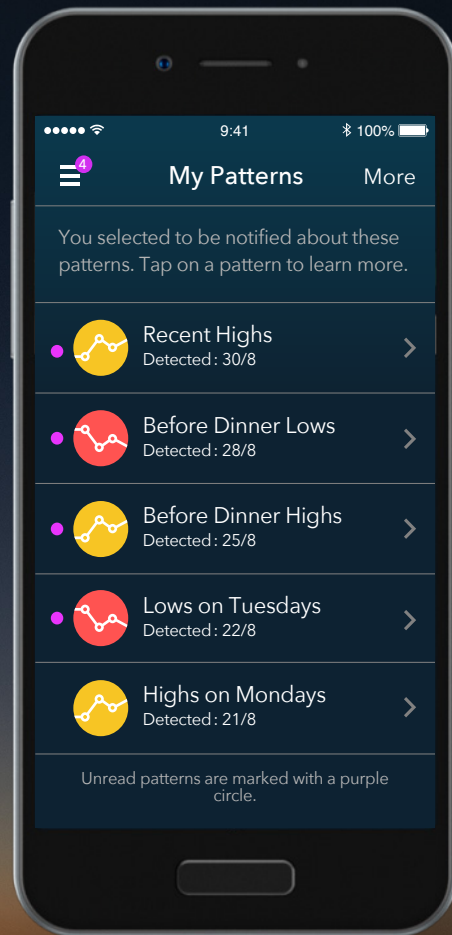

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

1. Minu näidumustrid

Valige “Main Menu” ning seejärel “My Patterns”.

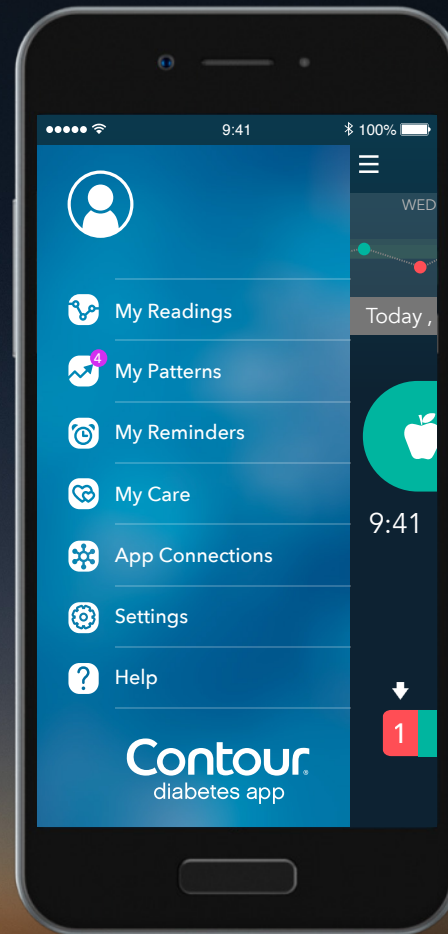


Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

2. Minu näidumustrid

“**My Patterns**” vaates kuvatakse kõik mustrid, mille kohta olete teavitust soovinud.


Lugemata muster on märgitud lilla ringikesega.

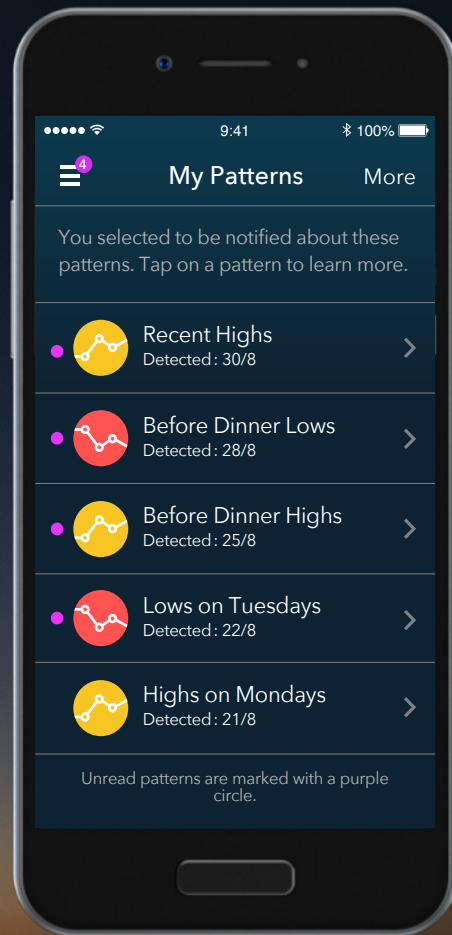

Contour
plus ONE
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

2. Minu näidumustrid


Mustrite valimiseks või ajaloo vaatamiseks valige **“More”**.

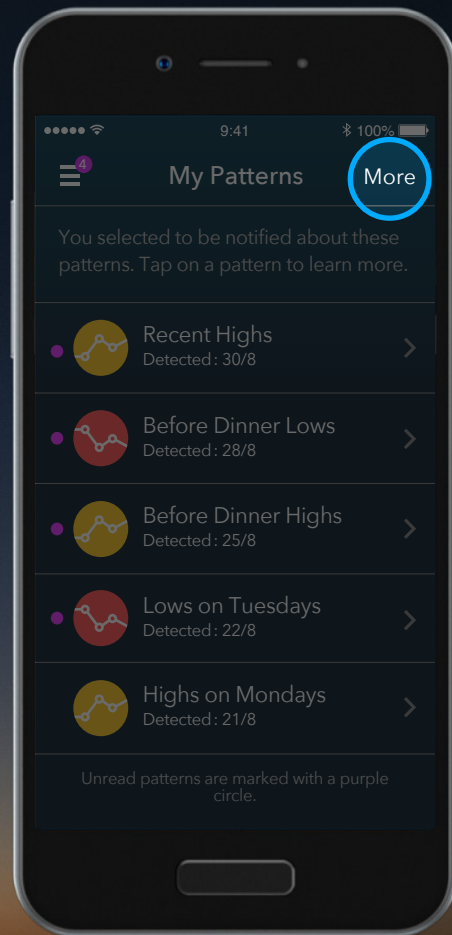

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

3. Minu näidumustrid


Märkimaks milliste mustrite kohta soovite teavitusi, valige **“Pattern Selection”**.

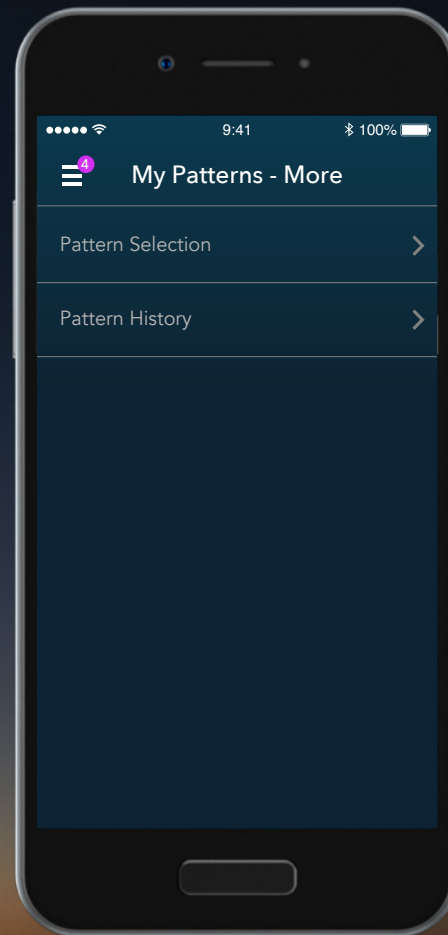

Contour[®]
plus **ONE**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

3. Minu näidumustrid


Märkimaks milliste mustrite kohta soovite teavitusi, valige “**Pattern Selection**”.

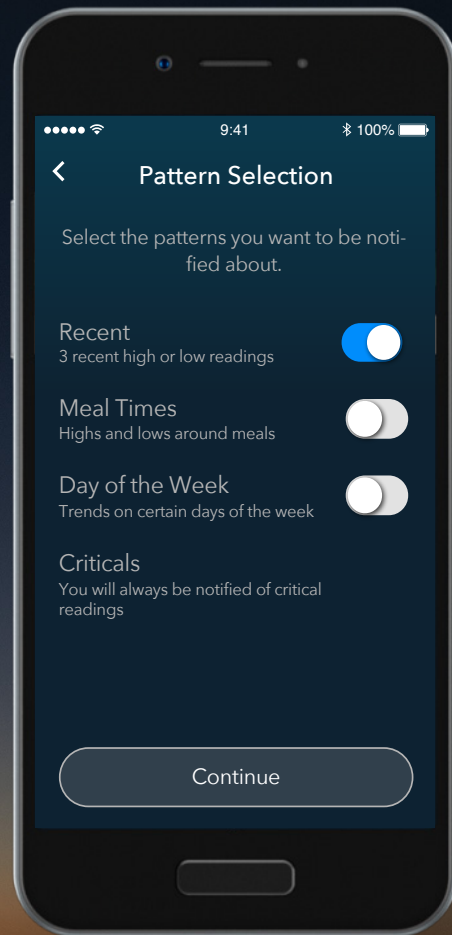

Contour[®]
plus **ONE**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

3. Minu näidumustrid

Märkimaks milliste mustrite kohta soovite teavitusi, valige “**Pattern Selection**”.

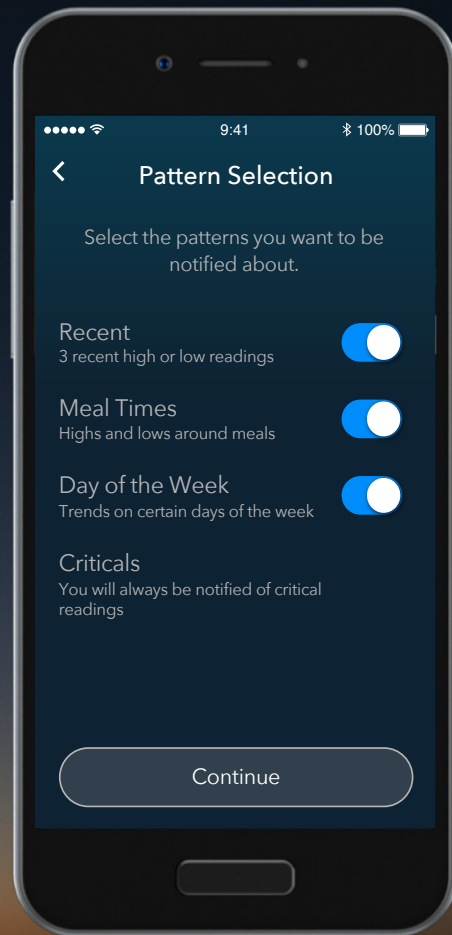


Contour[®]
plus **ONE**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

4. Minu näidumustrid

Kõik tuvastatud mustrid kuvatakse **“My Patterns”** vaates.


“My Patterns” vaates kuvatakse mustrid, mille kohta soovisite teavitust. Lugemata muster on märgitud lilla ringikesega.

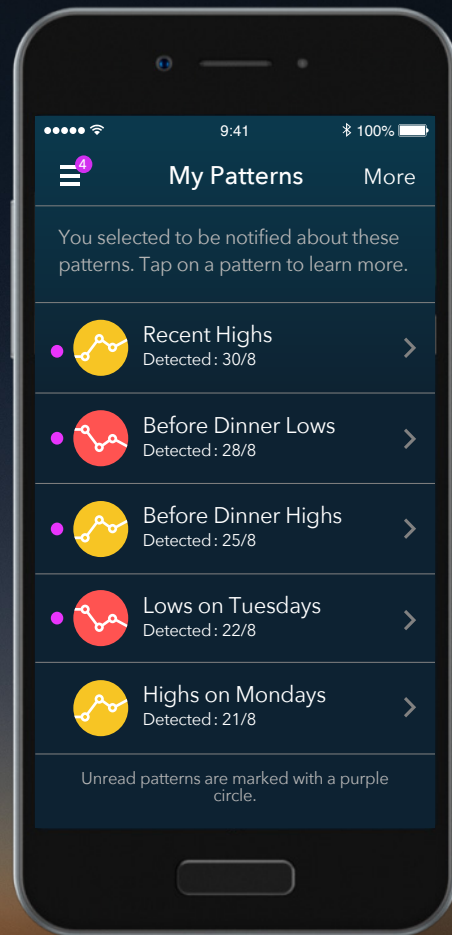

**Contour[®]
plus ONE**
Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

4. Minu näidumustrid


Võimaldab vaadata mustri üksikasju ja annab lisainfot võimalike põhjuste kohta.

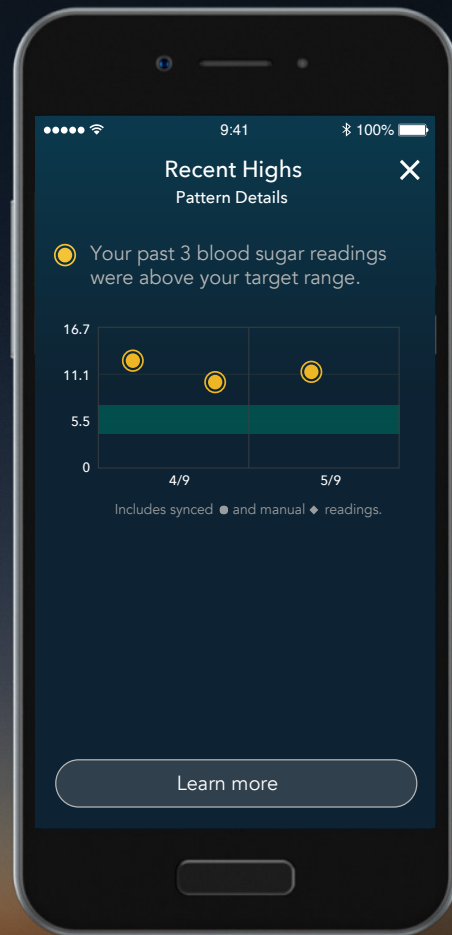

Contour[®]
plus **ONE**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

4. Minu näidumustrid


Võimaldab saada lisainfot antud mustri võimalike tekkepõhjuste kohta ja märkida põhjuseks näiteks toit, ravimid või kehaline aktiivsus.

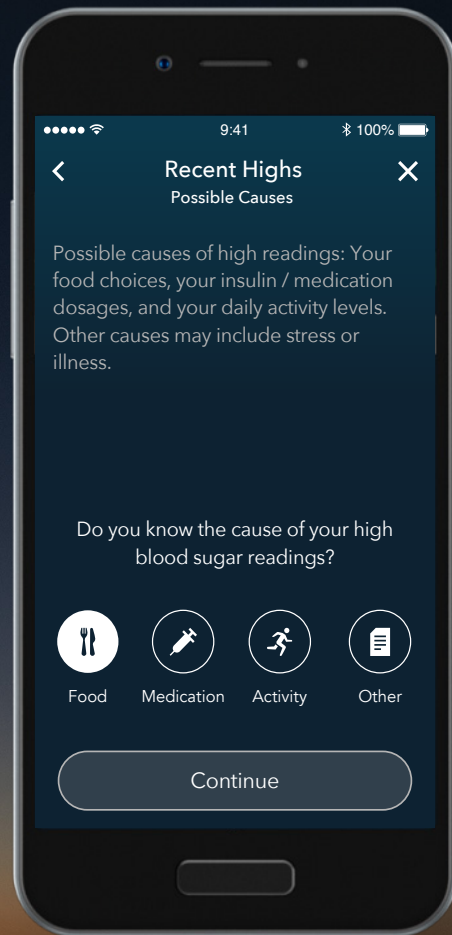

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

4. Minu näidumustrid


Võimaliku tekkepõhjuse kohta on võimalik seadistada ka meeldetuletus.

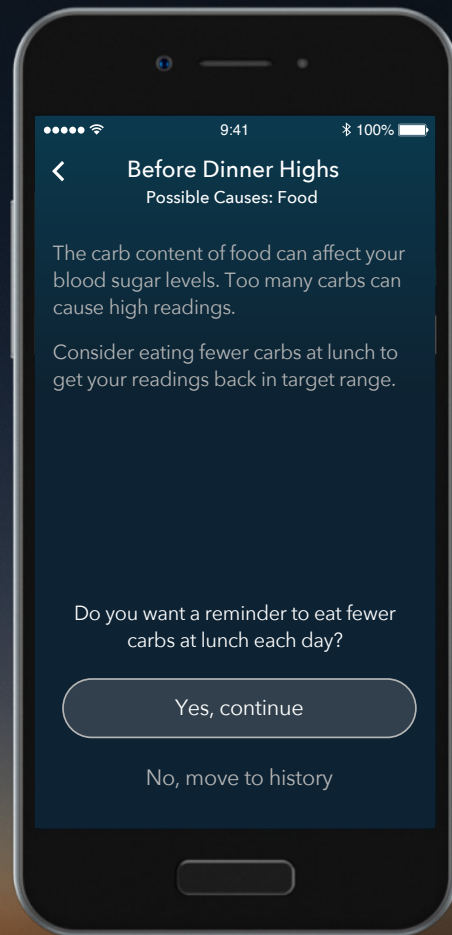

Contour
plus ONE
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

5. Minu näidumustrid


Mustrid on nähtavad igal ajal alamenüüs **“Pattern History”**.

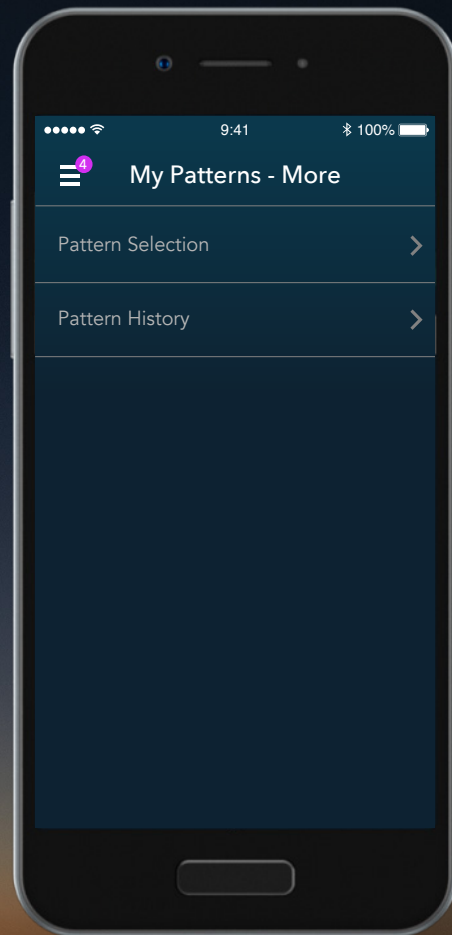

Contour[®]
plus **ONE**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

5. Minu näidumustrid


Näidumustrite ajaloos “**Pattern History**” kuvatakse eelnevad mustrid, mis pole enam aktiivsed..

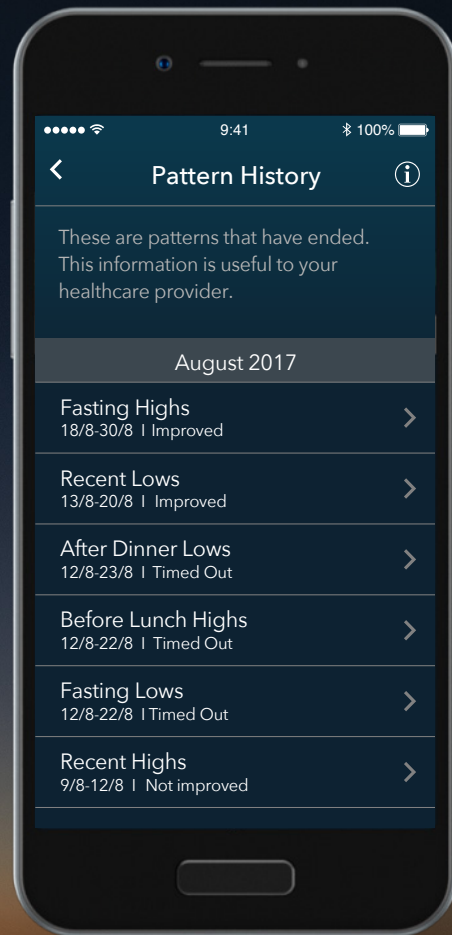

Contour[®]
plus **ONE**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

5. Minu näidumustrid

Näidumustrite ajaloos “**Pattern History**” kuvatakse eelnevad mustrid, mis pole enam aktiivsed.

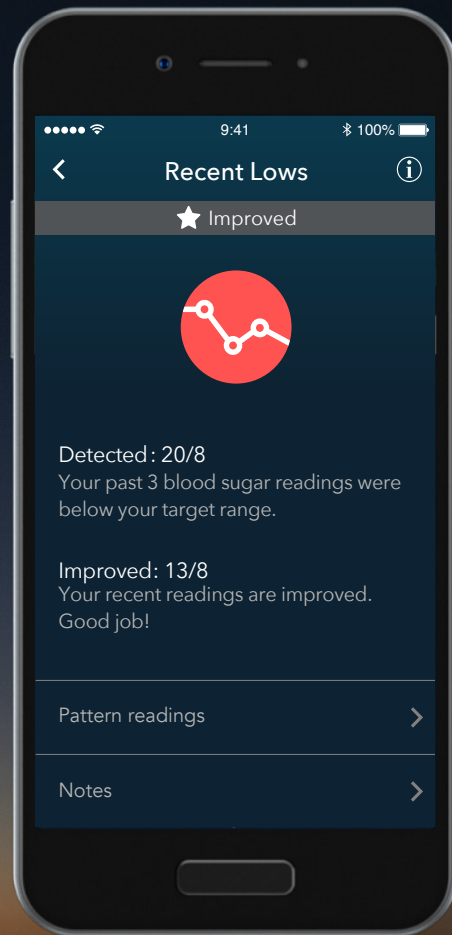

Contour[®]
plus **ONE**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

Kui teil tekib küsimusi **CONTOUR PLUS ONE** nutika glükomeetri või Contour Diabetes rakenduse kohta, siis konsulteerige arstiga. Lisainfot toodete kohta leiate kasutusjuhendist.

Lisainfot toodete ja nende kättesaadavuse kohta teie riigis leiate veebiaadressilt **diabetes.ascensia.com**.



Esitatud patsiendiandmed on näitlikud.


Konsulteerige alati perearstiga enne raviplaan, toitumis- või treeningharjumuste muutmist.



Apple ja Apple logo on Ameerika Ühendriikides ja mujal registreeritud Apple Inc. kaubamärgid. Apple Store on Apple Inc. registreeritud teenusmärk.

Bluetooth sõnatahis ja logo on Bluetooth SIG Inc. registreeritud kaubamärgid, mille kasutamine on litsentseeritud. Google Play ja Google Play logo on Google Inc. registreeritud kaubamärgid.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logo ja Contour on Ascensia Diabetes Care Holdings AG registreeritud kaubamärgid.

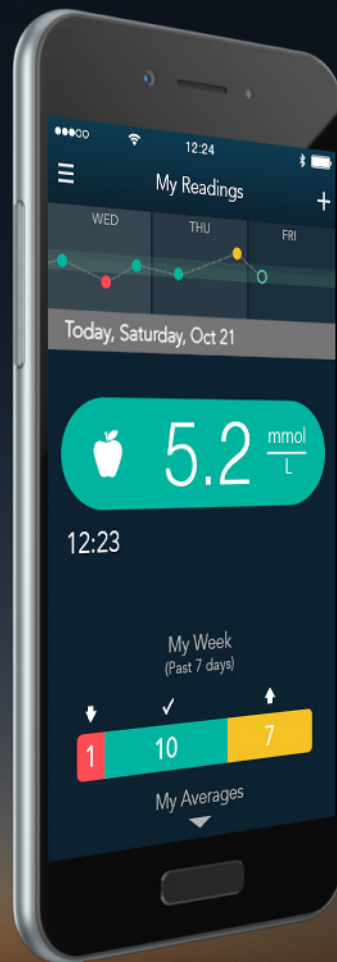

Contour
plus ONE
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

diabetes.ascensia.com

