




Contour[®] plus ONE[»]

Система вимірювання
рівня глюкози в крові

Створення Планів нагадувань про тестування із **ДОДАТКОМ** **CONTOUR®DIABETES**




Завжди консультуйтеся з Вашим лікарем до того, як змінювати лікування, дієту або фізичну активність.

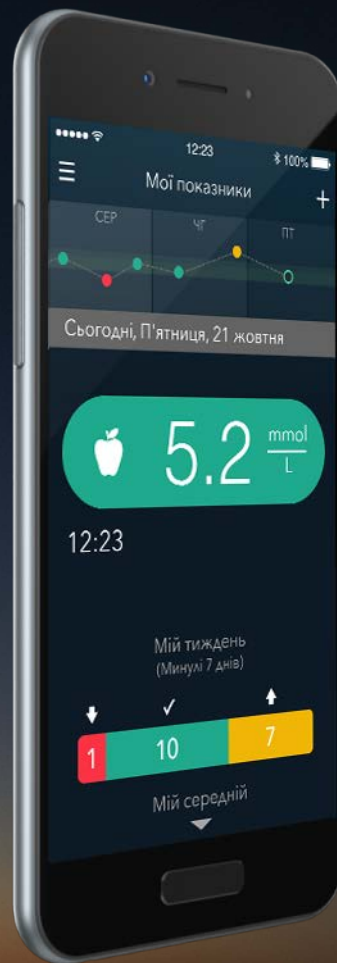

Contour®
plus ONE»
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

Плани нагадувань про тестування допомагають вам оптимізувати самоконтроль, надаючи результати, що дадуть вам кращу картину вашого рівня глюкози

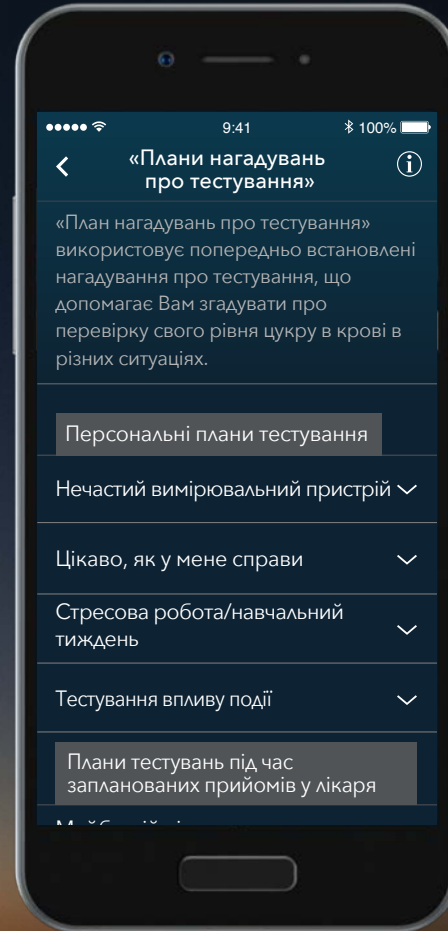


**Contour[®]
plus ONE[™]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

1.

План нагадувань про тестування


Вим можете вибрати **План нагадувань про тестування** у Головному Меню - **Мої Нагадування**, торкнувшись “+”.

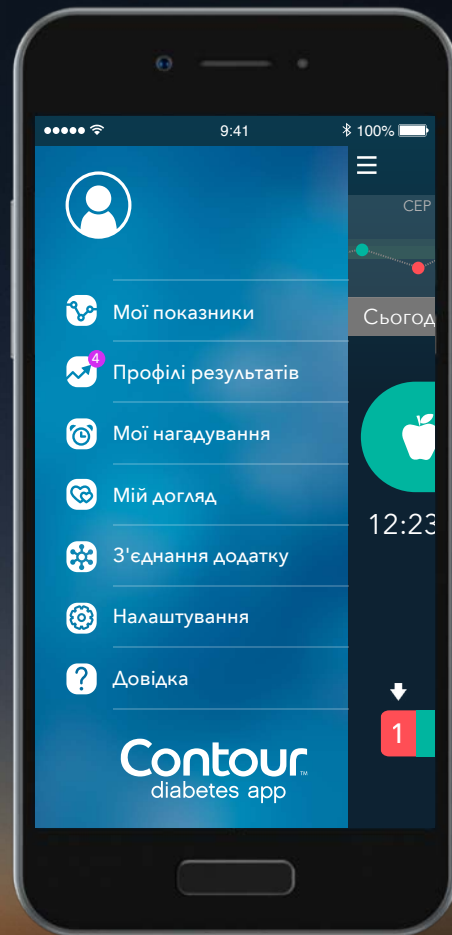

Contour[®]
plus ONE[»]
Система вимірювання
рівня глюкози в крові


1. **План нагадувань про тестування**

Вим можете вибрати **План нагадувань про тестування** у Головному Меню - **Мої Нагадування**, торкнувшись “+”.

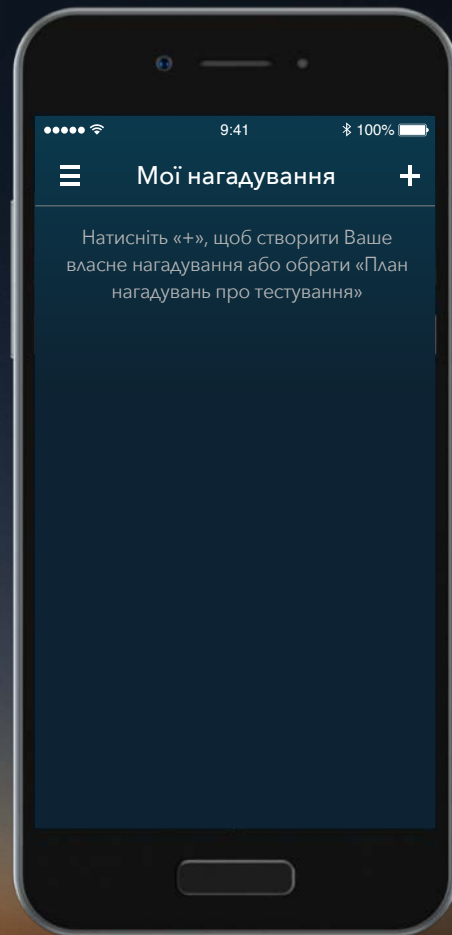

Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові


1. **План нагадувань про тестування**
Виберіть **План нагадувань про тестування**

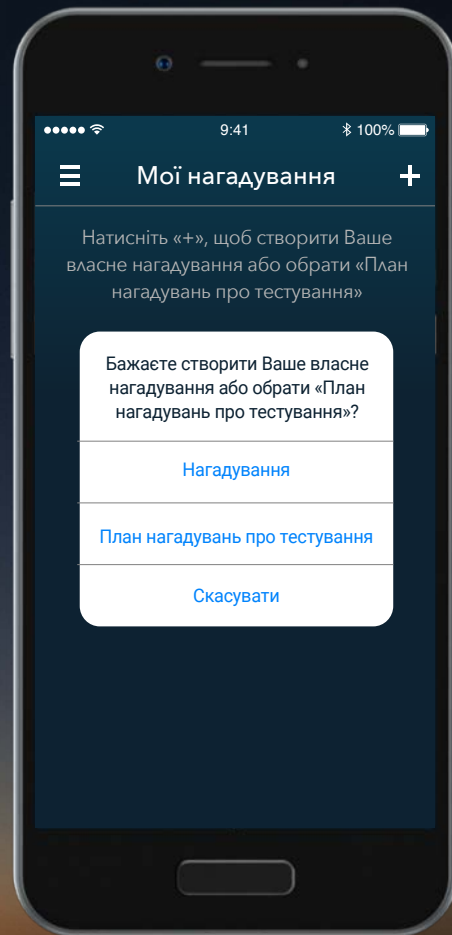

Contour[®]
plus **ONE**[™]
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

2. План нагадувань про тестування

Виберіть **План нагадувань про тестування**, з яким ви хочете працювати.

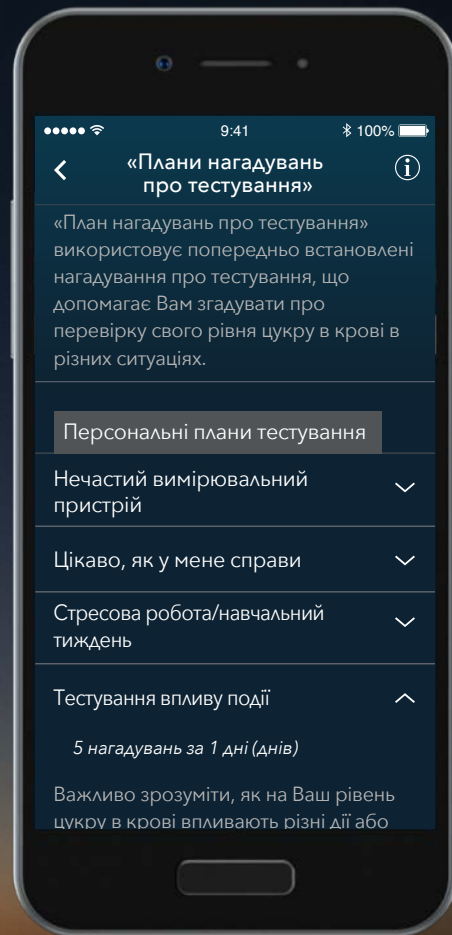


Contour[®]
plus ONE[™]
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

2. План нагадувань про тестування

Виберіть **План нагадувань про тестування**, з яким ви хочете працювати.

Торкнувшись стрілочки біля кожного плану, ви побачите більше про нього.

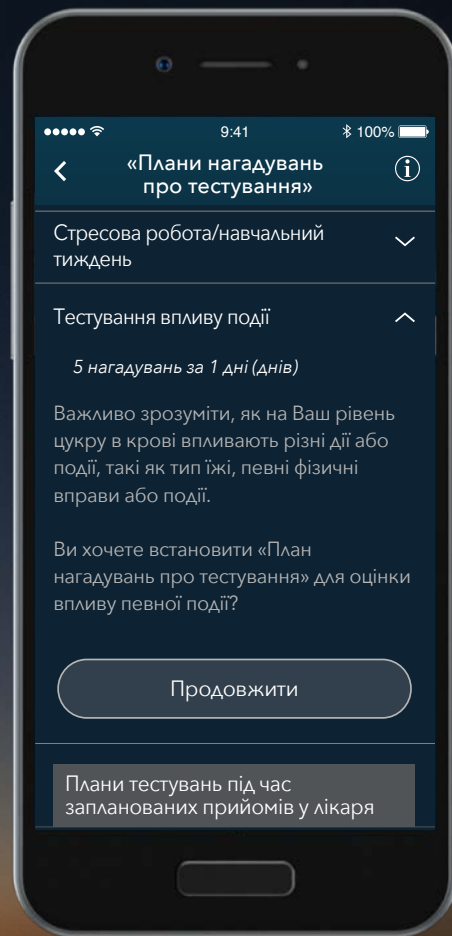


Contour[®]
plus ONE[®]
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

2. План нагадувань про тестування

Виберіть **План нагадувань про тестування**, з яким ви хочете працювати.

Торкнувшись стрілочки біля кожного плану, ви побачите більше про нього.


Виберіть **Продовжити**, щоб налаштувати обраний **План нагадувань про тестування**.

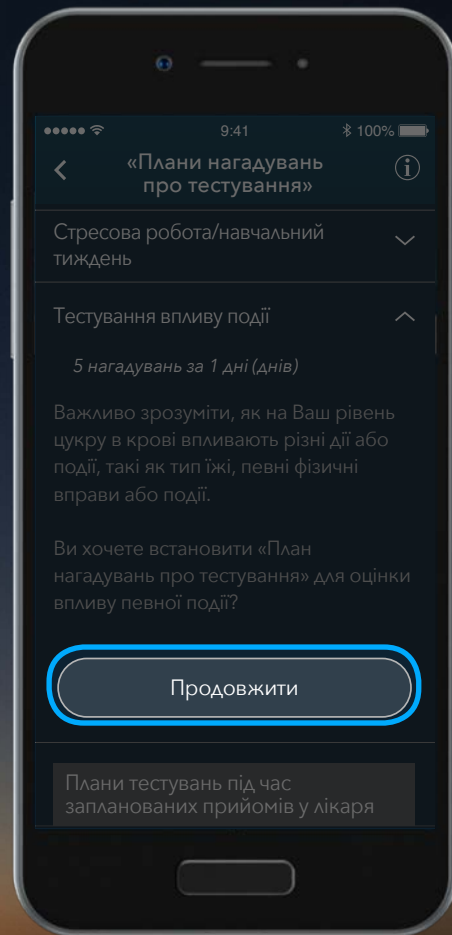

**Contour[®]
plus ONE[™]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

3. **План нагадувань про тестування**


Торкніться дати та часу, щоб задати подію, яку ви хочете відслідковувати.

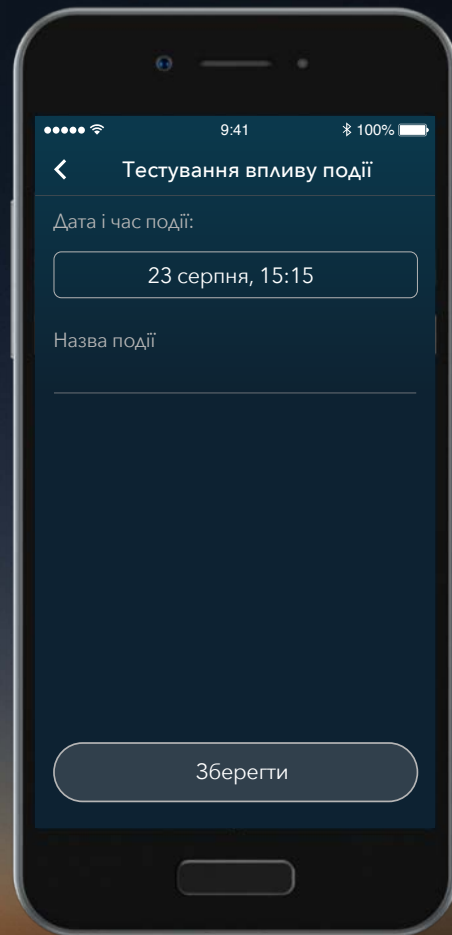

Contour[®]
plus **ONE**»
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

3. План нагадувань про тестування


Торкніться дати та часу, щоб задати подію, яку ви хочете відслідковувати.

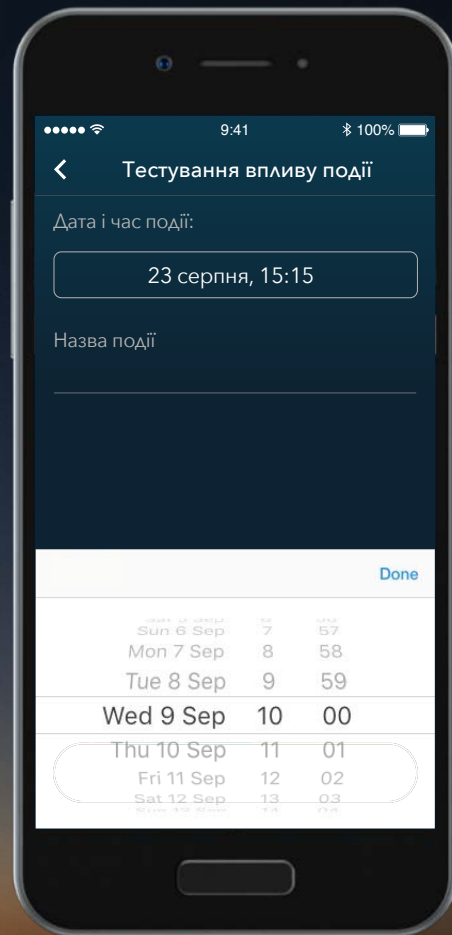

Contour[®]
plus ONE[»]
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

3. **План нагадувань про тестування**


Торкніться Назви події, щоб відкрити клавіатуру та назвати подію.

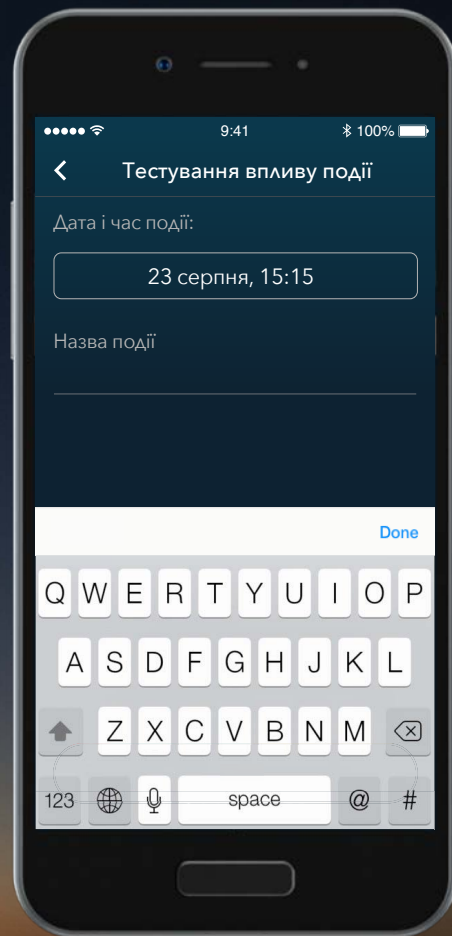

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові


3. **План нагадувань про тестування**

Торкніться **Зберегти**.

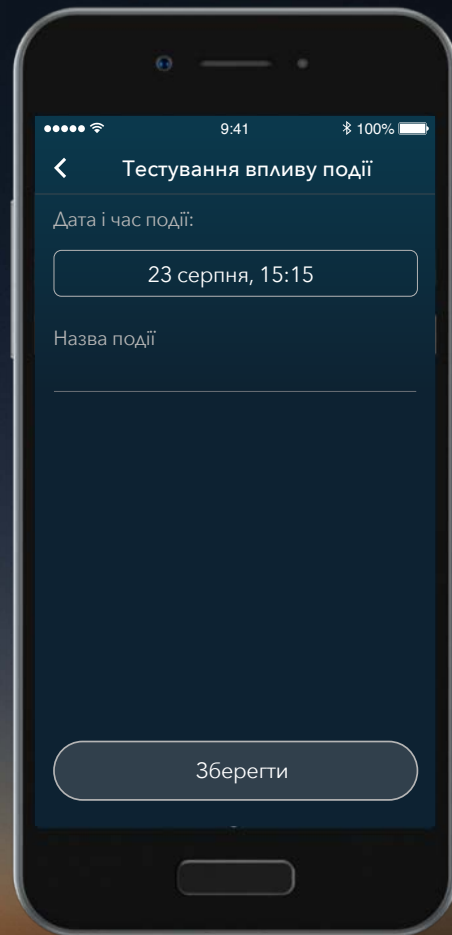

Contour[®]
plus **ONE**[»]
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

3. **План нагадувань про тестування**
- Торкніться **Зберегти**.
- Ваш **План нагадувань про тестування** тепер активовано.

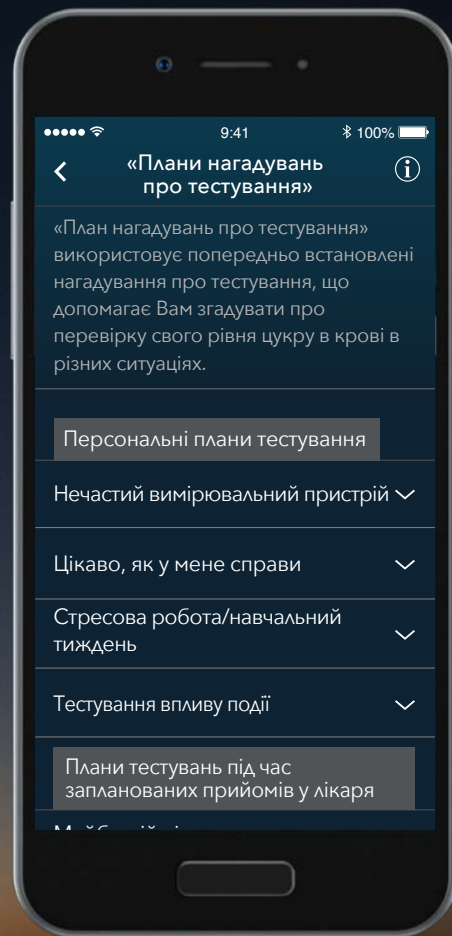

Contour[®]
plus **ONE**[®]

Система вимірювання
рівня глюкози в крові

Поговоріть з Вашим лікарем та зверніться до посібника користувача, якщо у Вас є питання про глюкометр **CONTOUR® PLUS ONE** або **додаток CONTOUR® DIABETES**.

Щоб отримати більше інформації та дізнатись, чи доступні ці продукти у Вашій країні, завітайте на diabetes.ascensia.com.



Гіпотетичні дані пацієнта виключно з метою демонстрації. Завжди консультуйтеся з Вашим лікарем до того, як змінювати лікування, дієту або фізичну активність.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks herein is under licence. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo and Contour are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Date of preparation: February 2018 Code: G.DC.10.2017.52580

© Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved.

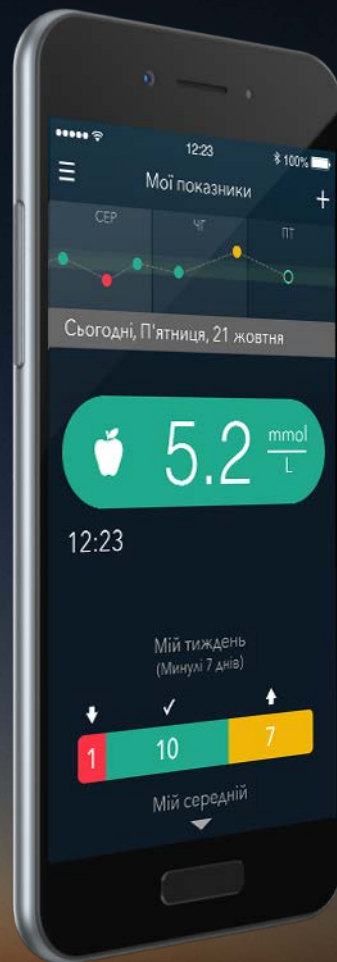

**Contour®
plus ONE**

Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com



Contour[®]

diabetes solutions