




Contour[®] plus ONE[»]

Система вимірювання
рівня глюкози в крові

Налаштування **додатку** **CONTOUR®DIABETES**

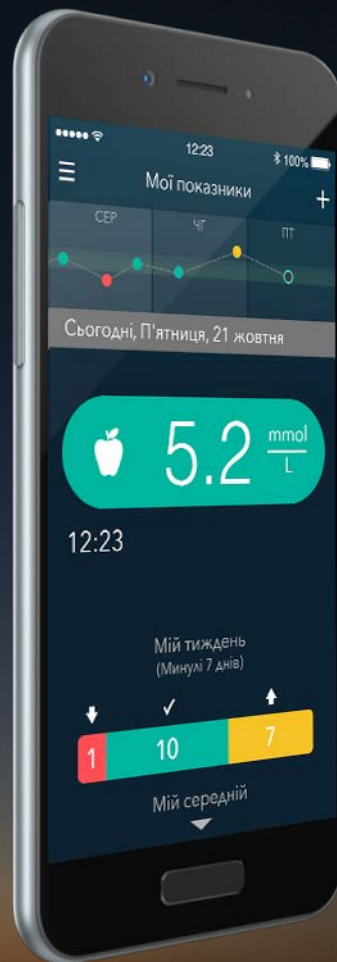

Contour
plus **ONE**

Система вимірювання
рівня глюкози в крові

Always consult with your healthcare provider prior to making changes to treatment, diet or exercise.


© Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG

diabetes.ascensia.com

Процес налаштування

Вперше, коли Ви користуєтесь **додатком CONTOUR®DIABETES**, Вам запропонують завершити процес встановлення, обравши Ваші налаштування.

Як тільки Ви створите свій обліковий запис та зв'яжете глюкометр з Вашим мобільним пристроєм, Вас буде проведено крізь процес встановлення.

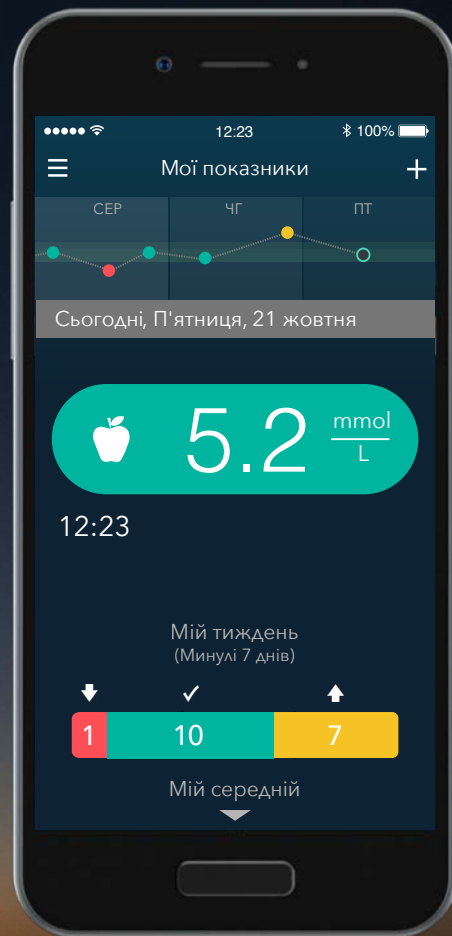


**Contour
plus ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

1.

Час та дата

автоматично синхронізує Час та Дату Вашого глюкометра з Вашим мобільним пристроєм, щоб підтримувати час Вашого глюкометра точним, навіть коли ви змінюєте часову зону та при переході на літній/зимній час.

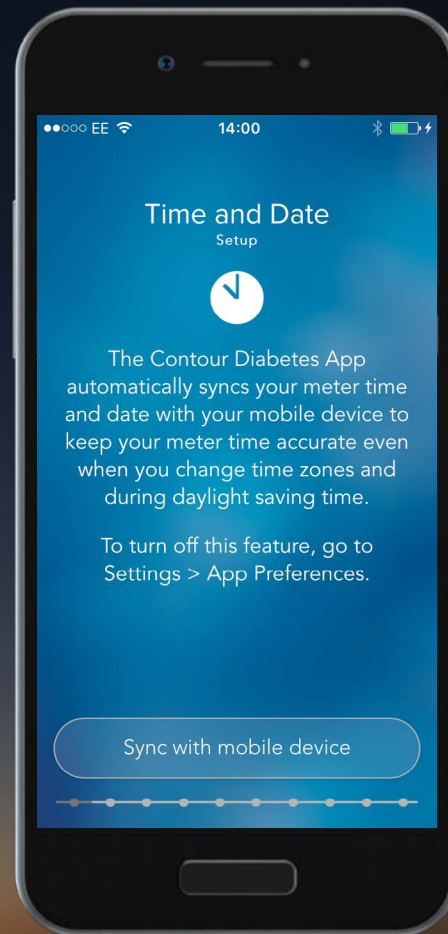


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

2.

Час та дата

Оберіть **“Синхронізувати з мобільним пристроєм”**, щоб встановити Ваш місцевий Час та Дату для точних відміток часу у Ваших вимірюваннях цукру в крові.

Оберіть **“Продовжити”**.

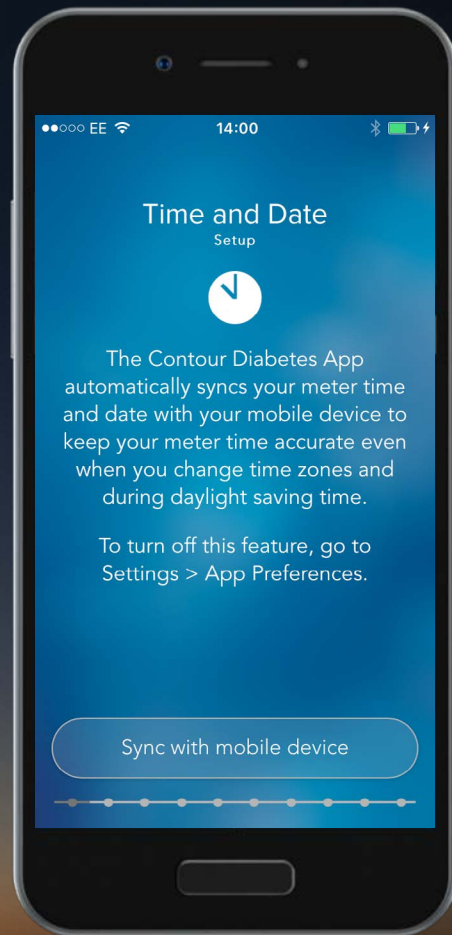


**Contour[®]
plus ONE[™]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

2.

Час та дата

Оберіть **“Синхронізувати з мобільним пристроєм”**, щоб встановити Ваш місцевий Час та Дату для точних відміток часу у Ваших вимірюваннях цукру в крові.

Оберіть **“Продовжити”**.

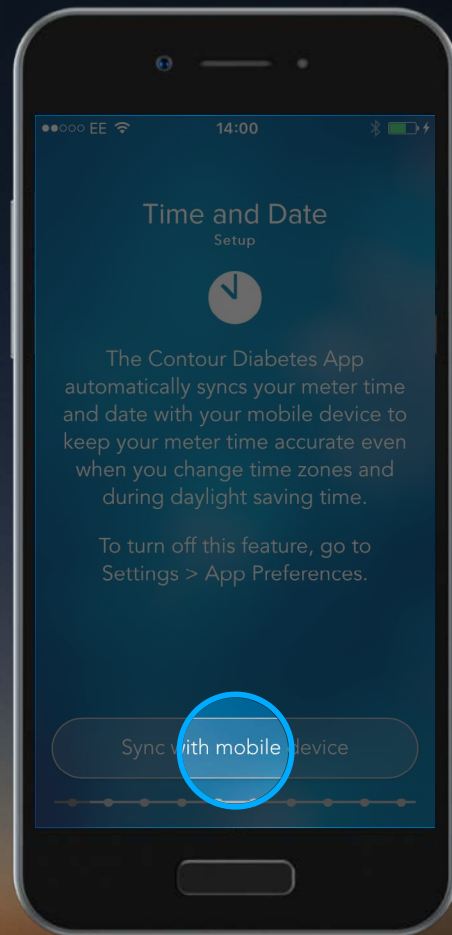


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

2.

Час та дата

Оберіть **“Синхронізувати з мобільним пристроєм”**, щоб встановити Ваш місцевий Час та Дату для точних відміток часу у Ваших вимірюваннях цукру в крові.

Оберіть **“Продовжити”**.

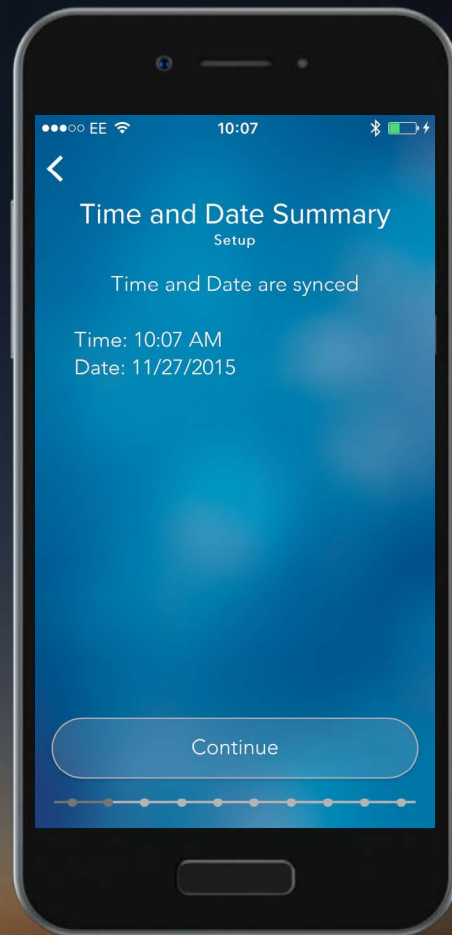


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

2.

Час та дата

Оберіть **“Синхронізувати з мобільним пристроєм”**, щоб встановити Ваш місцевий Час та Дату для точних відміток часу у Ваших вимірюваннях цукру в крові.

Оберіть **“Продовжити”**.

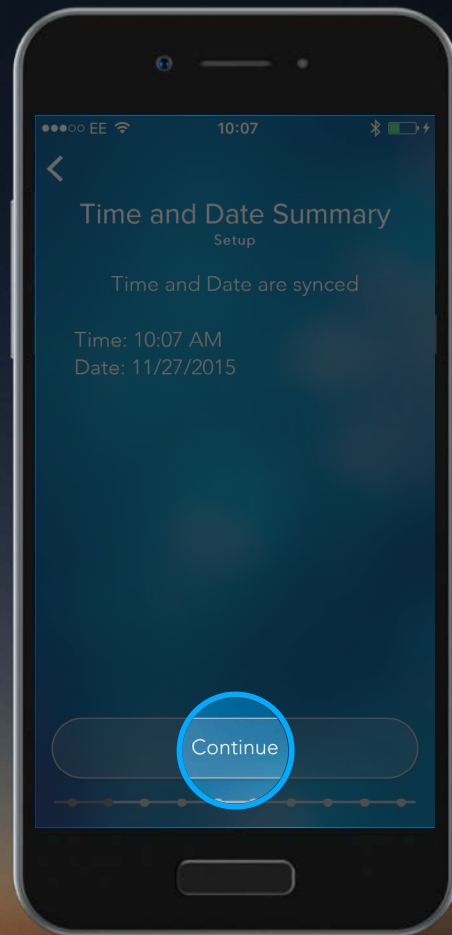

Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові


3.

Дільники дня

Додаток CONTOUR®DIABETES

використовує Дільники Дня, щоб розділити Ваш день на періоди прийому їжі та нічний час, для того щоб упорядкувати Ваші результати тестів глюкози крові.

Оберіть Продовжити, щоб встановити Ваші Дільники Дня.

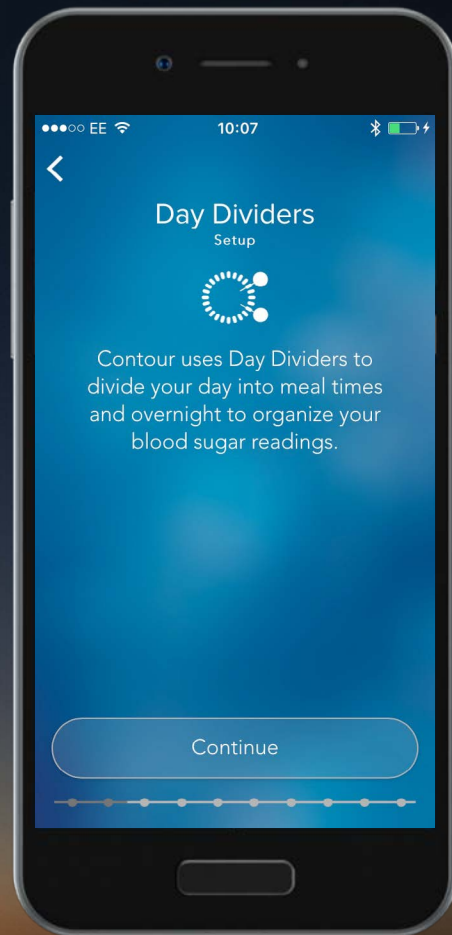

Contour[®]
plus **ONE**[»]
Система вимірювання
рівня глюкози в крові


3.

Дільники дня

Додаток CONTOUR®DIABETES

використовує Дільники Дня, щоб розділити Ваш день на періоди прийому їжі та нічний час, для того щоб упорядкувати Ваші результати тестів глюкози крові.

Оберіть Продовжити, щоб встановити Ваші Дільники Дня.

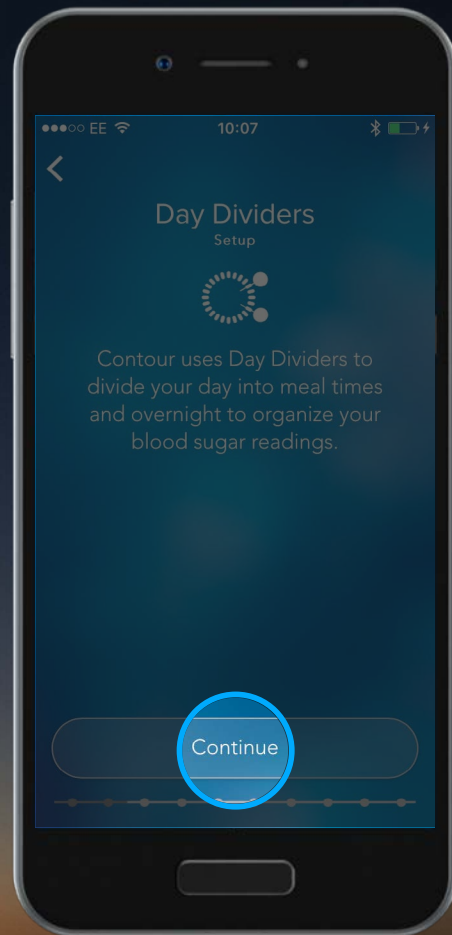

Contour[®]
plus **ONE**[»]

Система вимірювання
рівня глюкози в крові


diabetes.ascensia.com

4.

Дільники дня

Ви можете прийняти запропонований час, обравши **“Прийняти”**.

Торкніть **“стрілочку”** біля кожного дільника, щоб переглянути або змінити його.

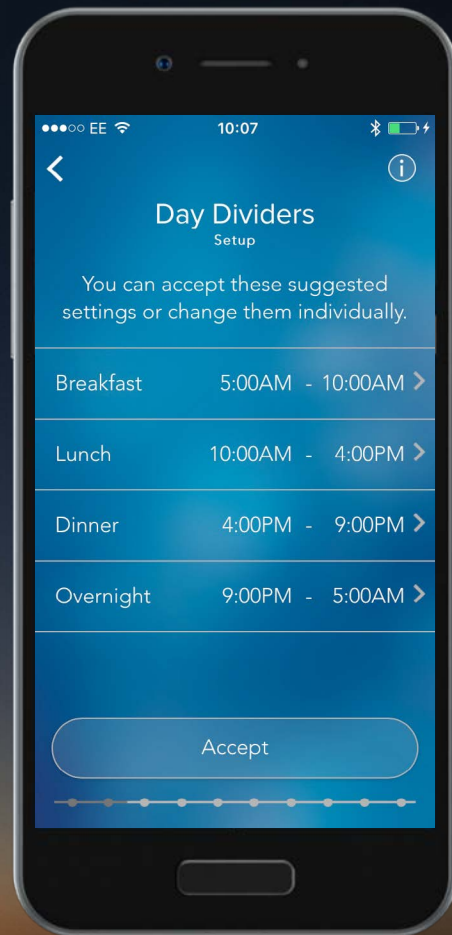


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

4.

Дільники дня

Ви можете прийняти запропонований час, обравши **“Прийняти”**.

Торкніть **“стрілочку”** біля кожного дільника, щоб переглянути або змінити його.

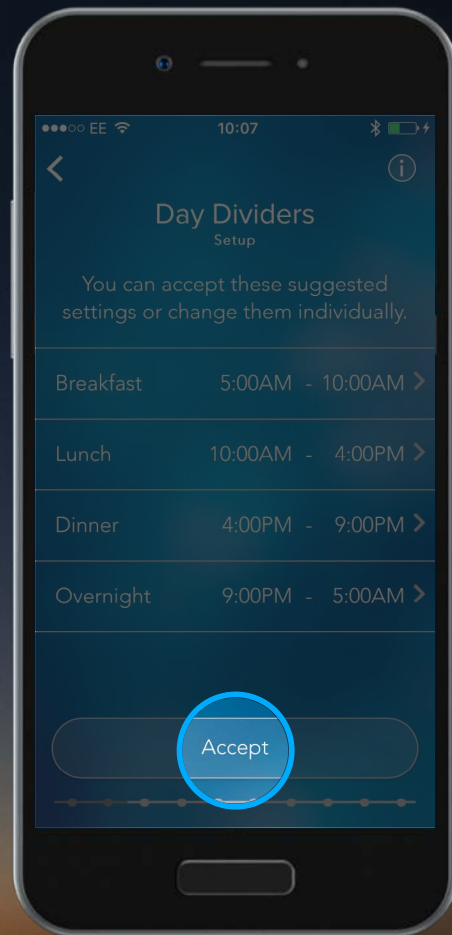


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

4.

Дільники дня

Ви можете прийняти запропонований час, обравши **“Прийняти”**.

Торкніть **“стрілочку”** біля кожного дільника, щоб переглянути або змінити його.

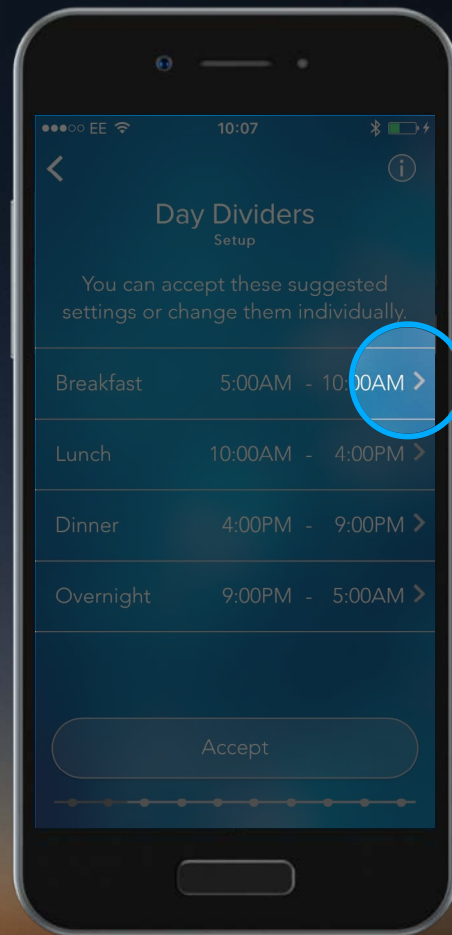


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

5.

Дільники дня

Потягніть маркер часу по циферблату, щоб змінити час.

Оберіть **“Готово”**, коли Ви завершили.

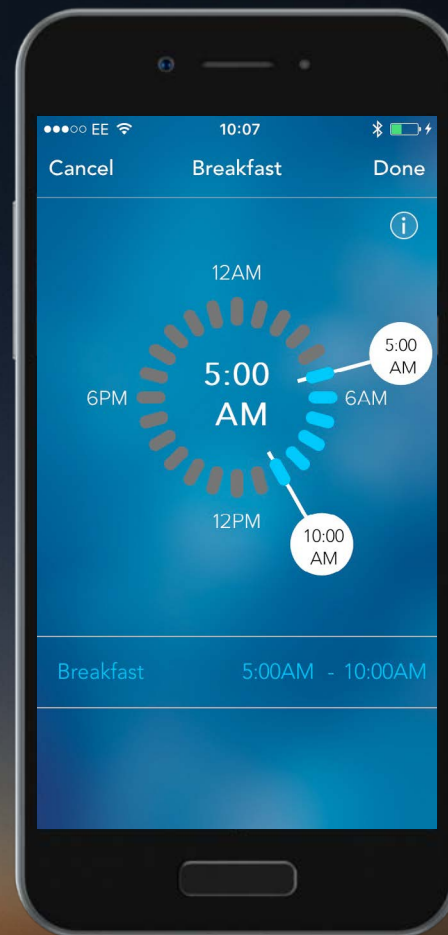

Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові


diabetes.ascensia.com

5.

Дільники дня

Потягніть маркер часу по циферблату, щоб змінити час.

Оберіть **“Готово”**, коли Ви завершили.

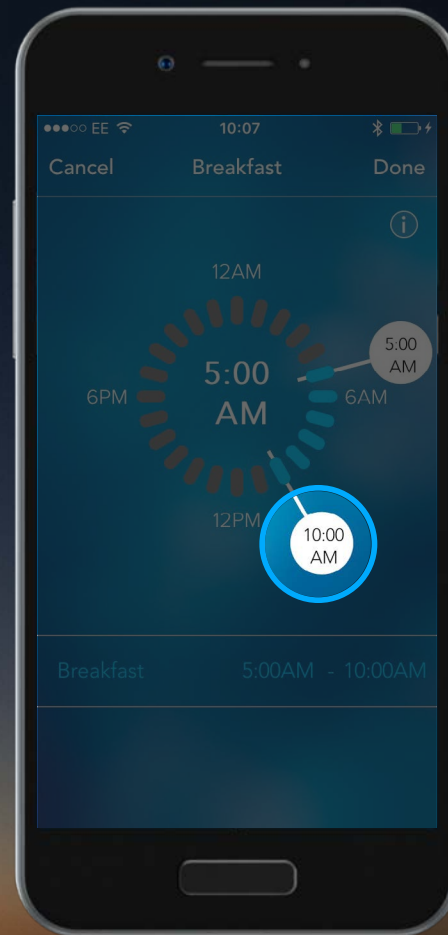


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

5.

Дільники дня

Потягніть маркер часу по циферблату, щоб змінити час.

Оберіть **“Готово”**, коли Ви завершили.

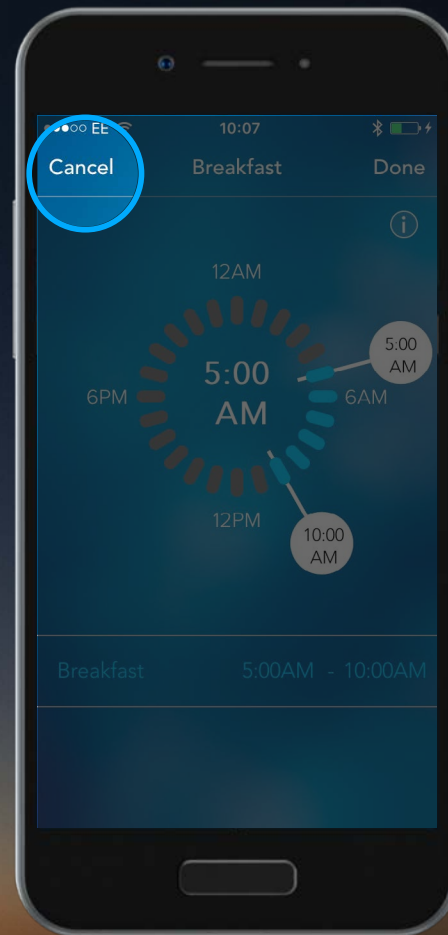


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

6.

Дільники дня

Оберіть “**Прийняти**”, щоб підтвердити обрані проміжки часу.

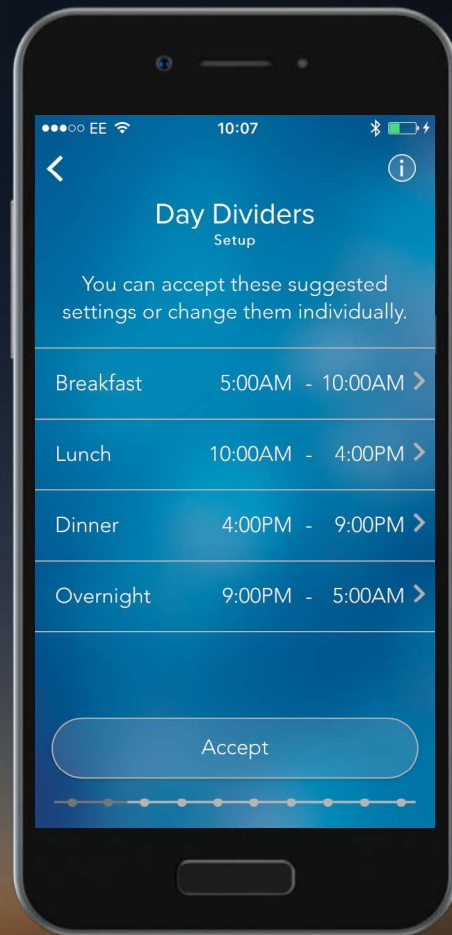


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

6.

Дільники дня

Оберіть “Прийняти”, щоб підтвердити обрані проміжки часу.

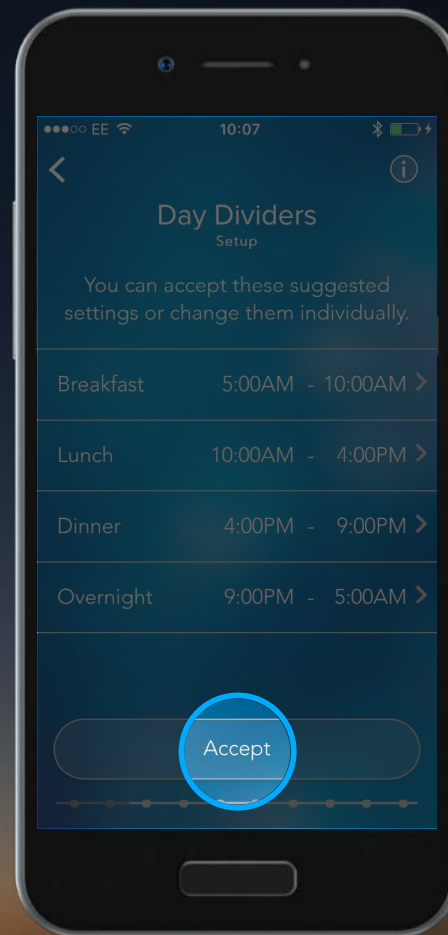


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

7.

Маркери їжі

Додаток **CONTOUR®DIABETES**

використовує Маркери їжі, щоб відмітити, коли рівень глюкози в крові виміряно по відношенню до прийому їжі.

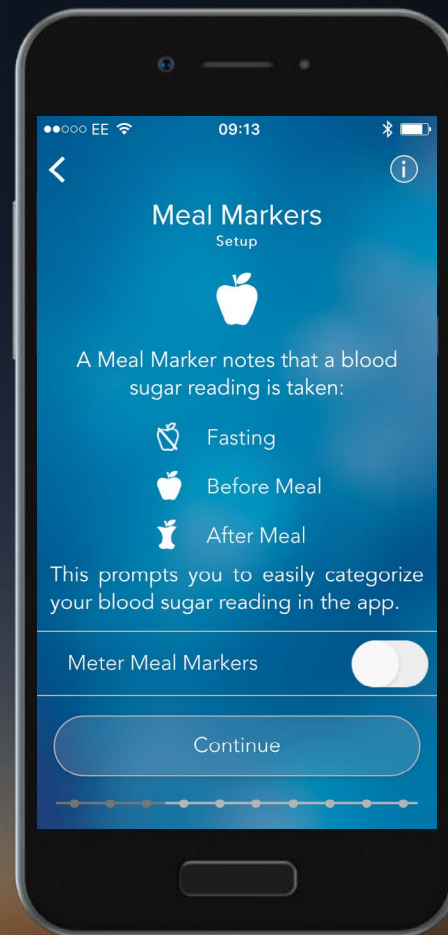


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

8.

Маркери їжі

Ви завжди можете категоризувати Ваші результати вимірювання глюкози крові з маркерами їжі у додатку.

Якщо Ви бажаєте зазначати прийоми їжі на глюкометрі після кожного вимірювання, оберіть **“кнопку переключення”**, щоб включити маркери їжі, а потім оберіть **“Продовжити”**.

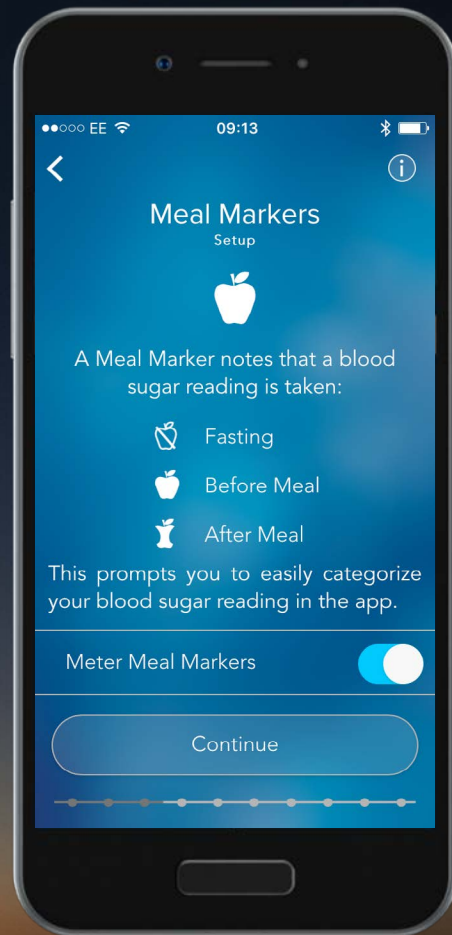


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

8.

Маркери їжі

Ви завжди можете категоризувати Ваші результати вимірювання глюкози крові з маркерами їжі у додатку.

Якщо Ви бажаєте зазначати прийоми їжі на глюкометрі після кожного вимірювання, оберіть **“кнопку переключення”**, щоб включити маркери їжі, а потім оберіть **“Продовжити”**.

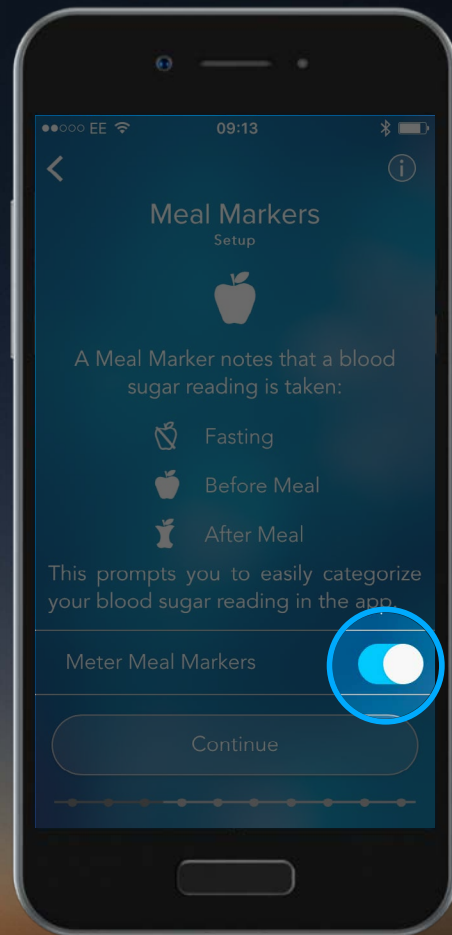


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

8.

Маркери їжі

Ви завжди можете категоризувати Ваші результати вимірювання глюкози крові з маркерами їжі у додатку.

Якщо Ви бажаєте зазначати прийоми їжі на глюкометрі після кожного вимірювання, оберіть **“кнопку переключення”**, щоб включити маркери їжі, а потім оберіть **“Продовжити”**.

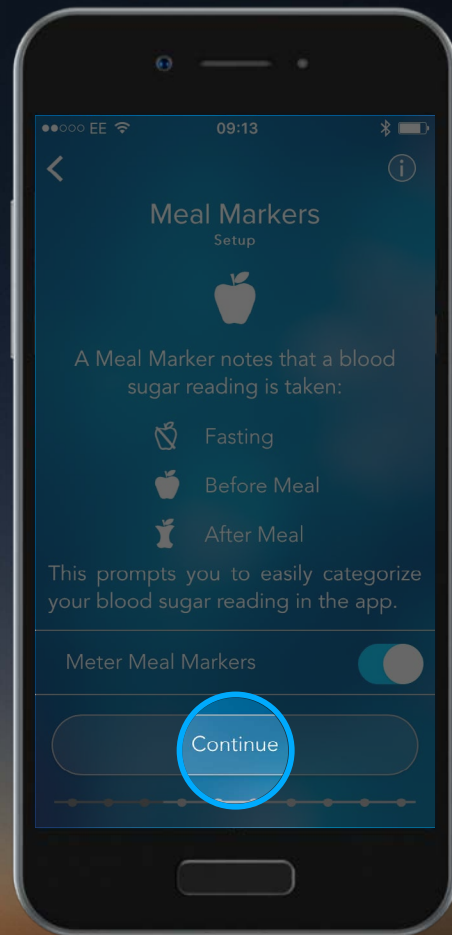

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові


9.

Цільові діапазони

Додаток CONTOUR®DIABETES порівнює Ваші результати вимірювання глюкози крові із Цільовим діапазоном, щоб повідомити Вам, чи вони вищі, ніжчі, або у цільовому рівні.

Оберіть **“Продовжити”**, щоб встановити Ваші Цільові діапазони.

УВАГА - поговоріть з Вашим лікарем до того, як змінювати Цільові діапазони у **додатку CONTOUR®DIABETES**.

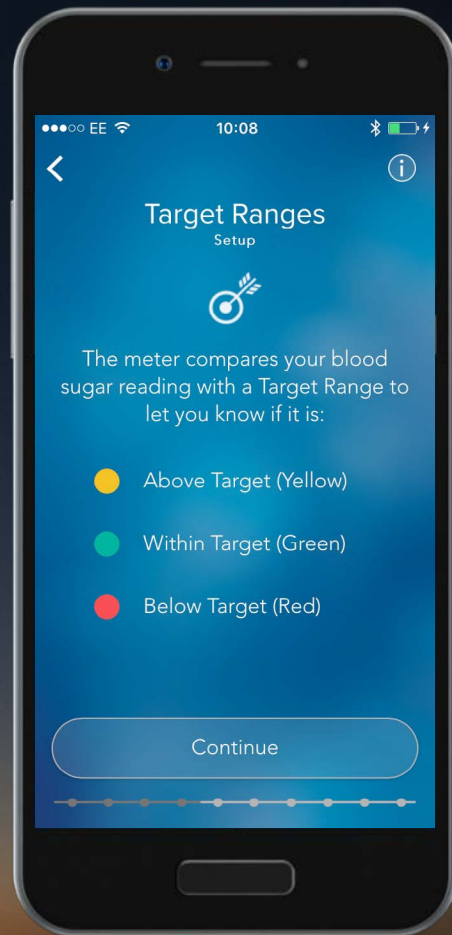

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові


9.

Цільові діапазони

Додаток CONTOUR®DIABETES порівнює Ваші результати вимірювання глюкози крові із Цільовим діапазоном, щоб повідомити Вам, чи вони вищі, ніжчі, або у цільовому рівні.

Оберіть **“Продовжити”**, щоб встановити Ваші Цільові діапазони.

УВАГА - поговоріть з Вашим лікарем до того, як змінювати Цільові діапазони у **додатку CONTOUR®DIABETES**.

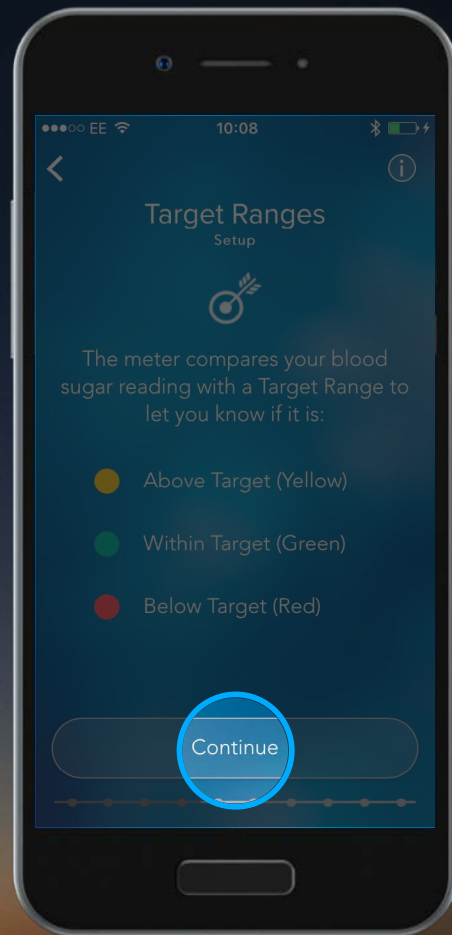

**Contour®
plus ONE»**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

9.

Цільові діапазони

Додаток CONTOUR®DIABETES порівнює Ваші результати вимірювання глюкози крові із Цільовим діапазоном, щоб повідомити Вам, чи вони вищі, ніжчі, або у цільовому рівні.

Оберіть **“Продовжити”**, щоб встановити Ваші Цільові діапазони.

УВАГА - поговоріть з Вашим лікарем до того, як змінювати Цільові діапазони у **додатку CONTOUR®DIABETES**.



**Contour®
plus ONE»**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

10.

Цільові діапазони

Ви можете прийняти попередньо задані діапазони, обравши **“Прийняти”**.

Торкніть **“стрілочку”** біля кожного дільника, щоб переглянути або змінити його.



Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

10.

Цільові діапазони

Ви можете прийняти попередньо задані діапазони, обравши **“Прийняти”**.

Торкніть **“стрілочку”** біля кожного дільника, щоб переглянути або змінити його.




Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

11.

Цільові діапазони

Тягніть цільовий рівень вгору та вниз, щоб змінити Цільовий Діапазон, або підтвердить попередньо встановлені Цільові Діапазони.

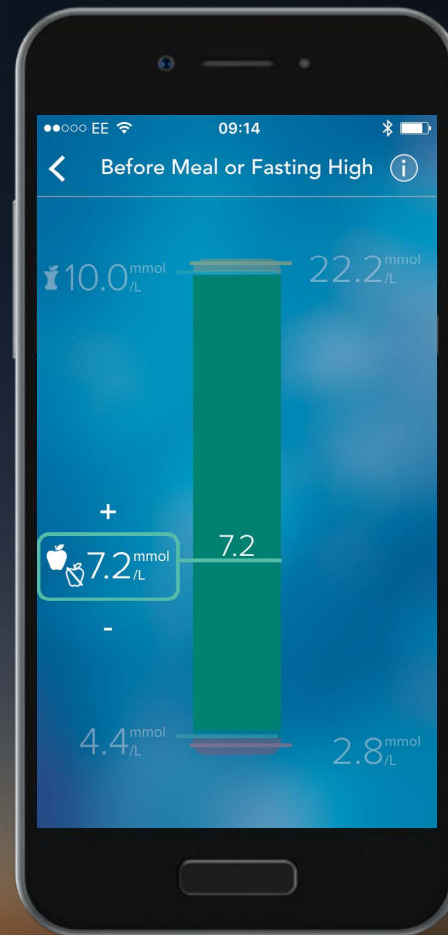

Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

11.

Цільові діапазони

Тягніть цільовий рівень вгору та вниз, щоб змінити Цільовий Діапазон, або підтвердить попередньо встановлені Цільові Діапазони.



Contour[®]
plus **ONE**[™]
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

12.

Цільові діапазони

Оберіть **“Прийняти”**, щоб встановити Ваші Цільові Діапазони.



Contour
plus ONE[®]
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

12.

Цільові діапазони

Оберіть **“Прийняти”**, щоб встановити Ваші Цільові Діапазони.




Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

13.

Вогники Цільових діапазонів

Порт для смужки глюкометра **CONTOUR PLUS ONE** кольоровим світлом показує Ваш результат глюкози крові у порівнянні з Цільовим діапазоном.

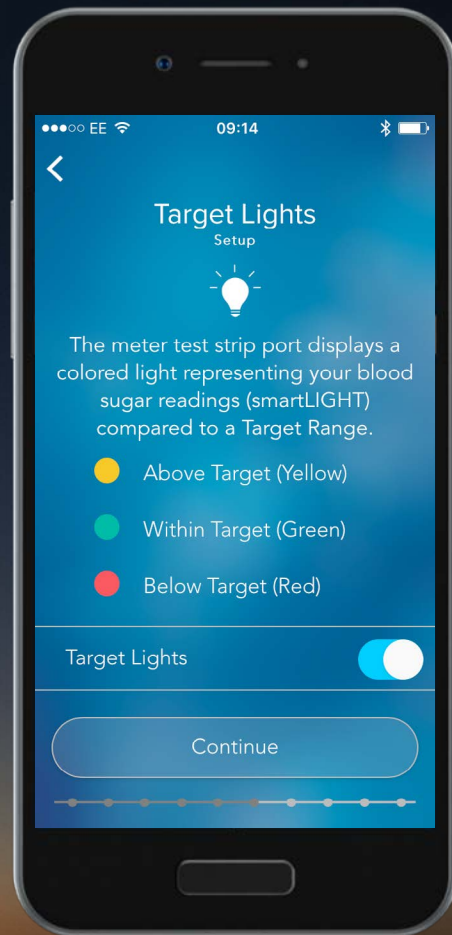


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

14.

Вогники Цільових діапазонів

Торкніть кнопку переключення, щоб ввімкнути та вимкнути Вогники Цільових Діапазонів.

Оберіть **“Продовжити”**, щоб встановити.

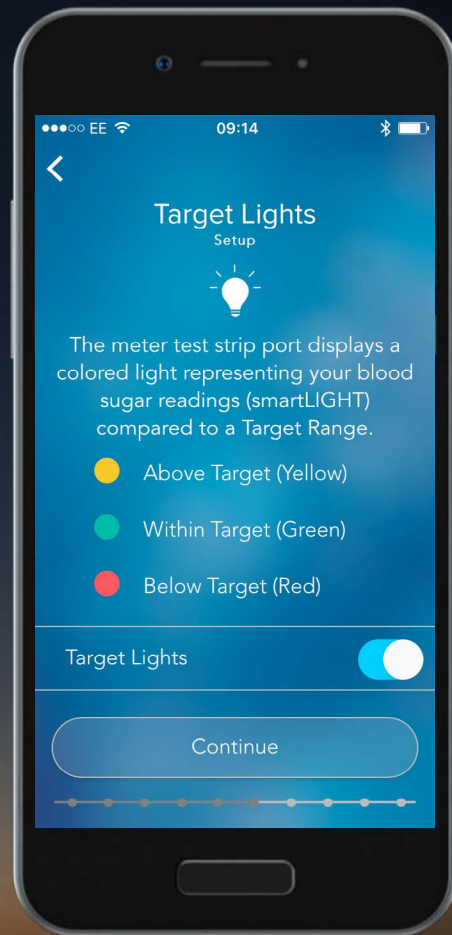


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

14.

Вогники Цільових діапазонів

Торкніть кнопку переключення, щоб ввімкнути та вимкнути Вогники Цільових Діапазонів.

Оберіть **“Продовжити”**, щоб встановити.

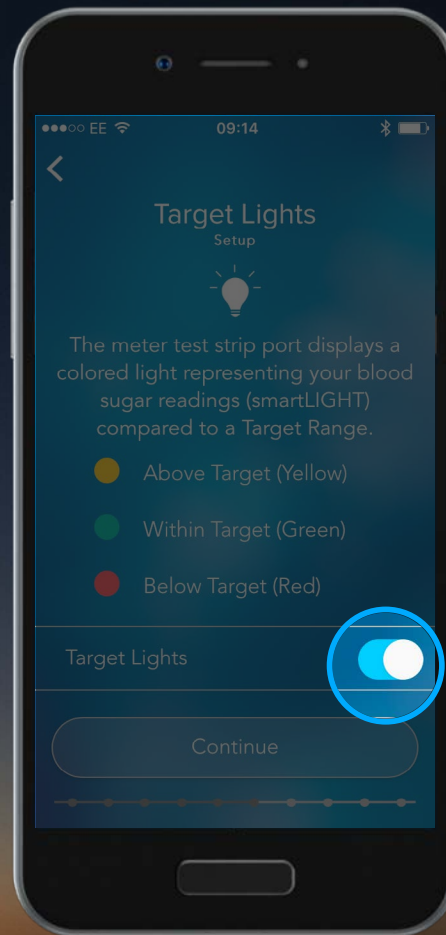


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

14.

Вогники Цільових діапазонів

Торкніть кнопку переключення, щоб ввімкнути та вимкнути Вогники Цільових Діапазонів.

Оберіть **“Продовжити”**, щоб встановити.

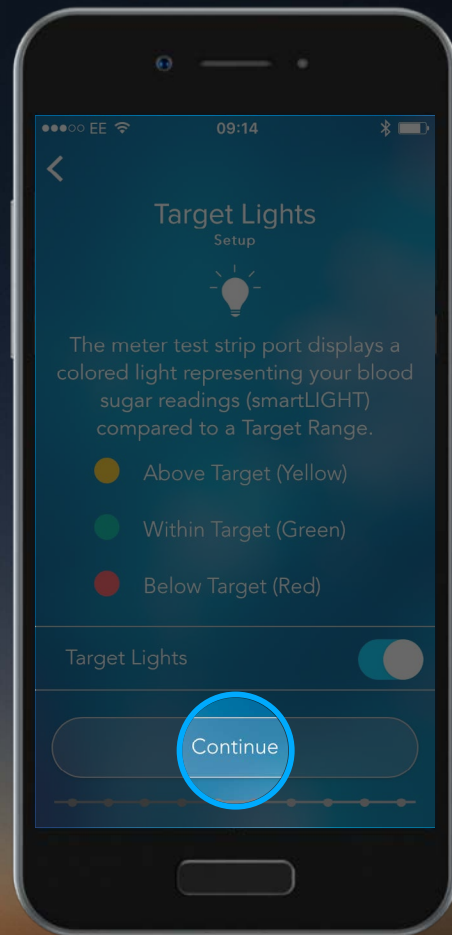


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

15.

Підсумок налаштування Глюкометра

Коли Ви завершили початкове встановлення глюкометра, з'являється екран підсумків.

Оберіть **“Продовжити”**, щоб підтвердити, або торкніть кнопки переключення, щоб включити або виключити налаштування.

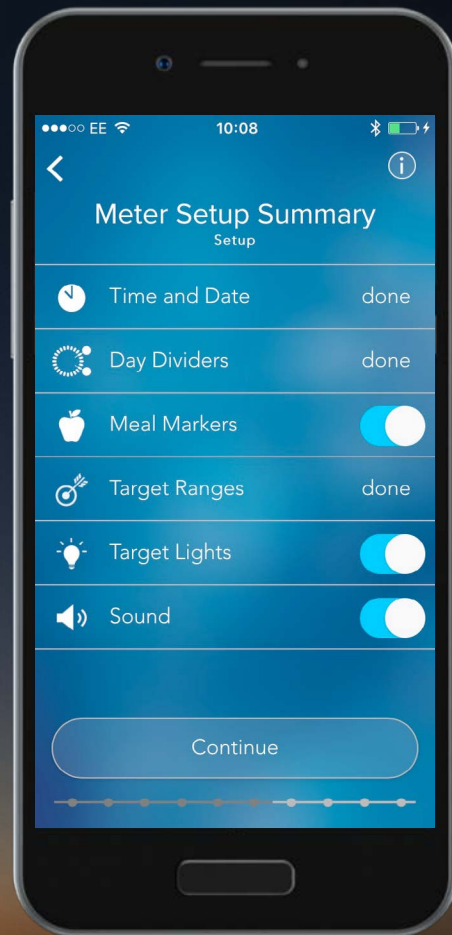


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

15.

Підсумок налаштування Глюкометра

Коли Ви завершили початкове встановлення глюкометра, з'являється екран підсумків.

Оберіть **“Продовжити”**, щоб підтвердити, або торкніть кнопки переключення, щоб включити або виключити налаштування.

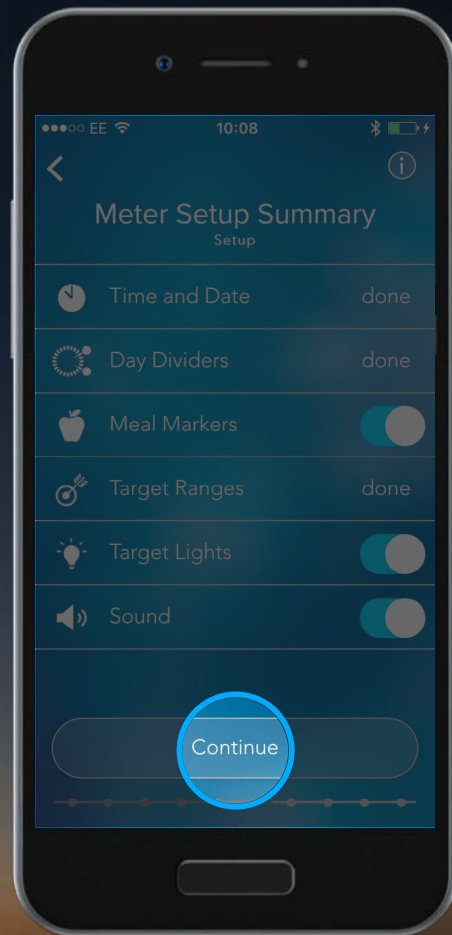


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

16.

Підсумок налаштування Глюкометра

Тепер оберіть **“Продовжити”**, щоб завершити налаштування **додатку CONTOUR DIABETES.**

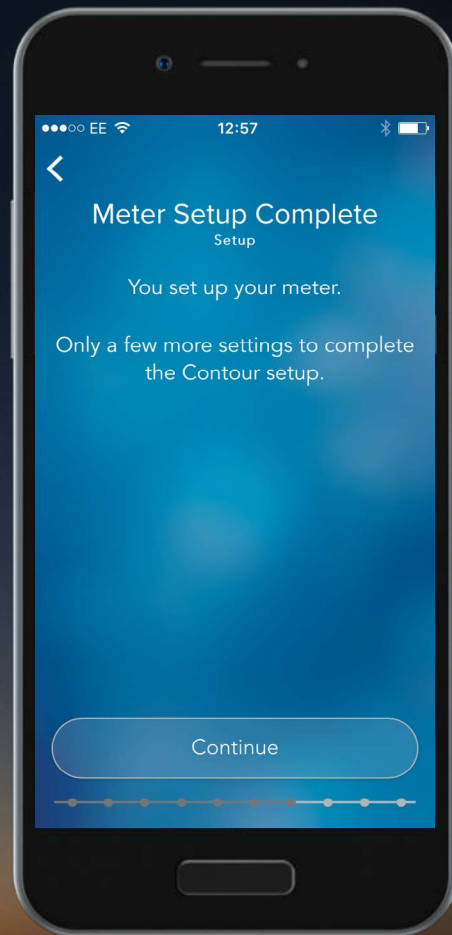


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

16.

Підсумок налаштування Глюкометра

Тепер оберіть **“Продовжити”**, щоб завершити налаштування **додатку CONTOUR®DIABETES.**

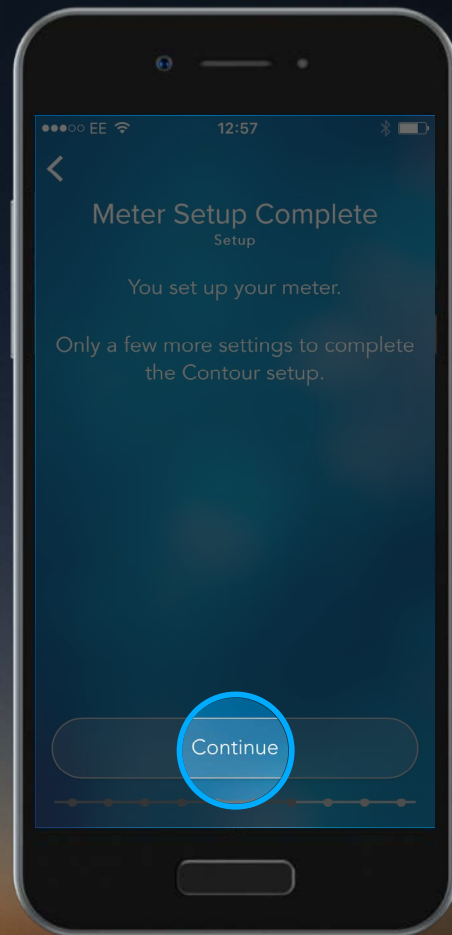

Contour
plus ONE
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com


17.

Невідкладні Виклики

Додаток CONTOUR®DIABETES

спонукає Вас зробити невідкладний виклик у разі критично високого або критично низького рівня глюкози крові.

Оберіть **“Продовжити”**, щоб задати Ваш місцевий номер Невідкладної допомоги.

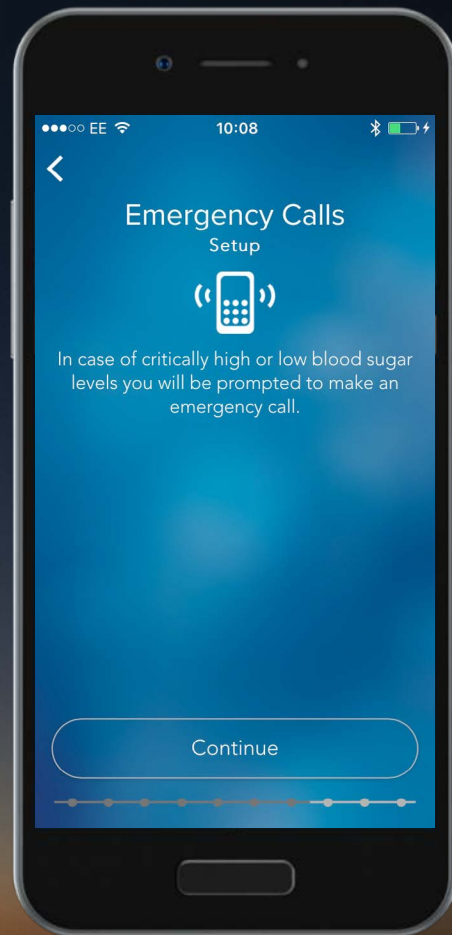

Contour
plus **ONE**


Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

17.

Невідкладні Виклики

Оберіть Ваш місцевий номер
Невідкладної допомоги та оберіть
“**Готово**”, коли завершите.

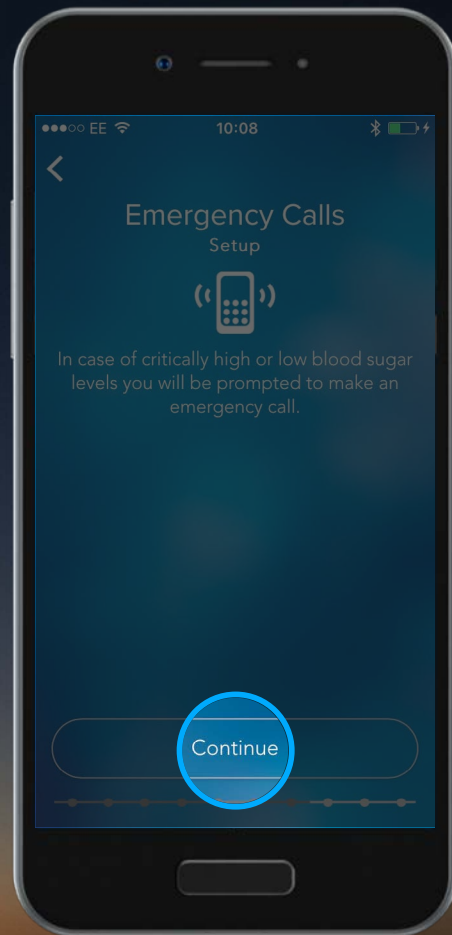


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

17.

Невідкладні Виклики

Оберіть Ваш місцевий номер
Невідкладної допомоги та оберіть
“Готово”, коли завершите.

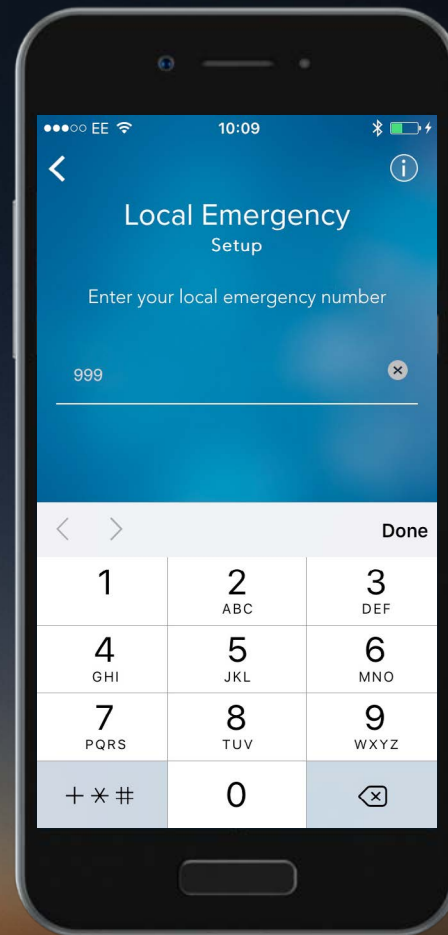


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

18.

Невідкладні Виклики

Додаток **CONTOUR®DIABETES** показує Ваші Термінові Контакти, коли Ваш рівень глюкози крові сягає критично високого або критично низького рівню.

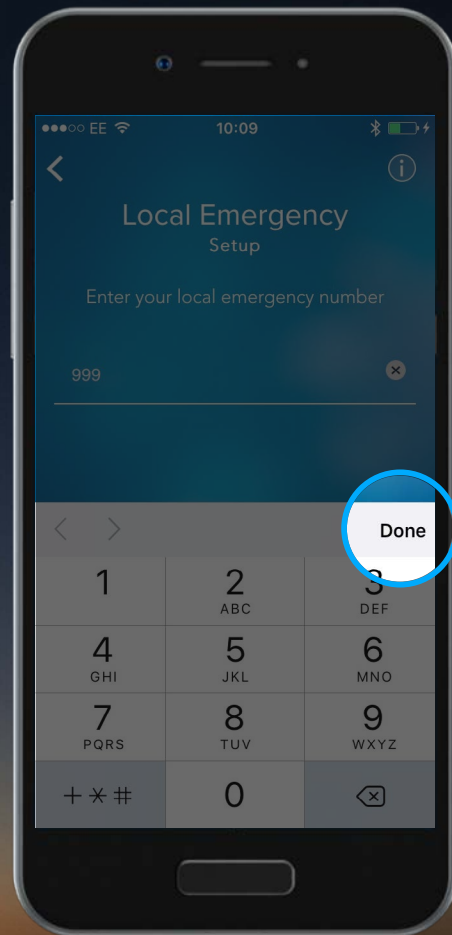


**Contour
plus ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

19.

Невідкладні Виклики

Введіть ім'я та номер Термінового Контакту, використовуючи клавіатуру.

Оберіть **“Готово”**, коли завершите.

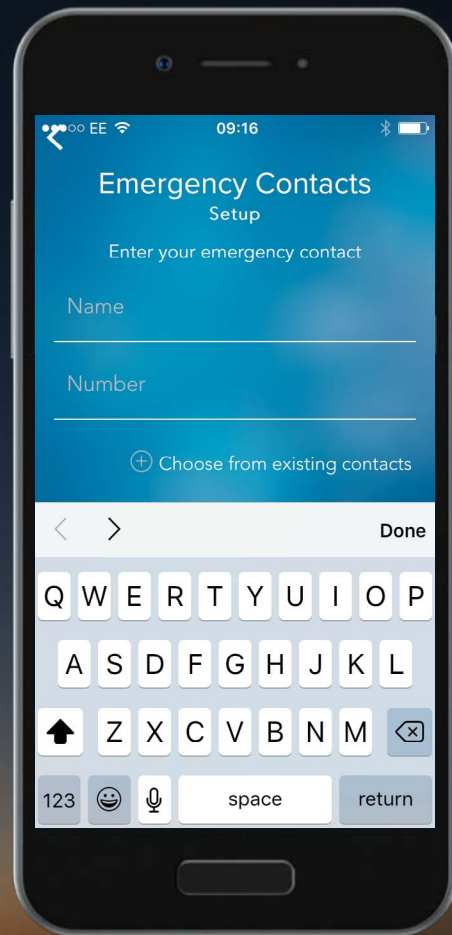


Contour
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

19.

Невідкладні Виклики

Введіть ім'я та номер Термінового Контакту, використовуючи клавіатуру.

Оберіть **“Готово”**, коли завершите.

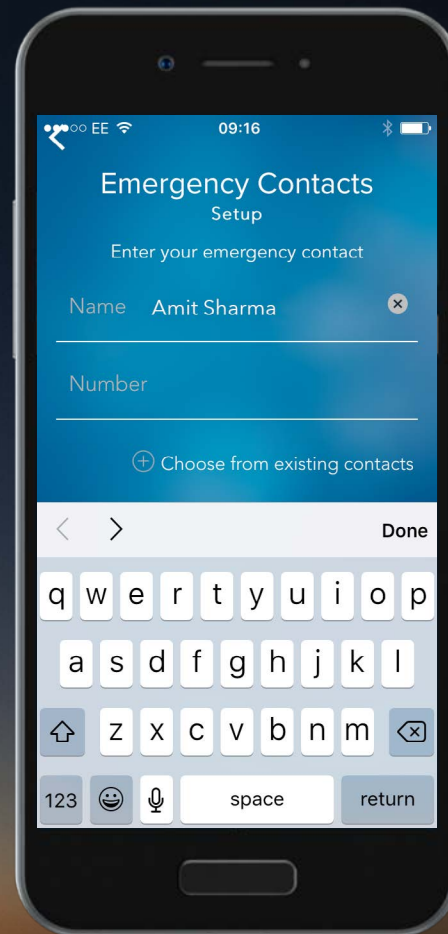


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

20.

Невідкладні Виклики

Введіть ім'я та номер Термінового Контакту, використовуючи клавіатуру.

Оберіть **“Готово”**, коли завершите.

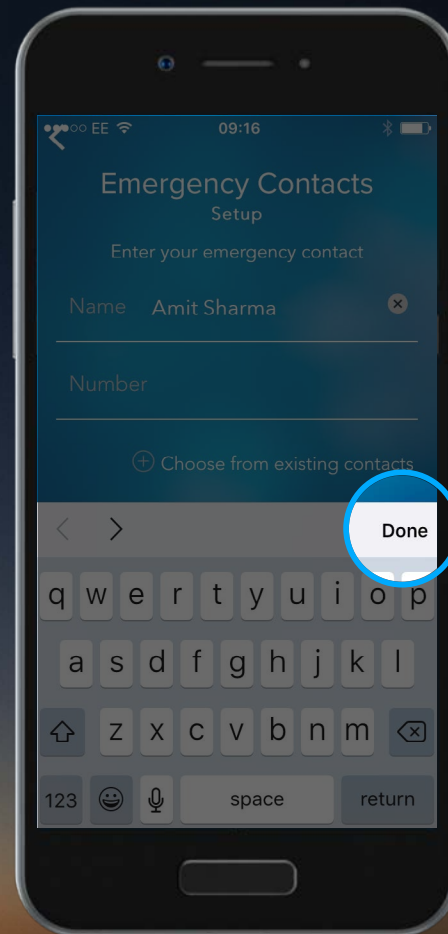


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

20.

Невідкладні Виклики

Ви побачите огляд того, що ввели.

Оберіть **“Продовжити”**, якщо все вірно.

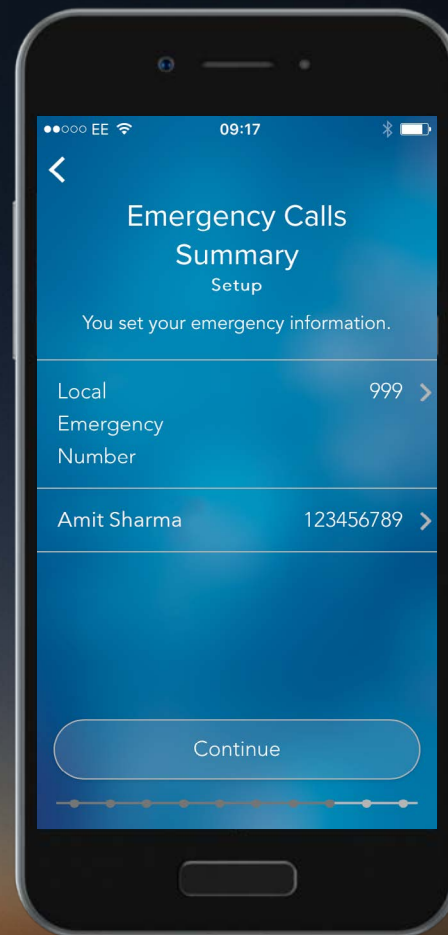


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

20.

Невідкладні Виклики

Ви побачите огляд того, що ввели.

Оберіть **“Продовжити”**, якщо все вірно.

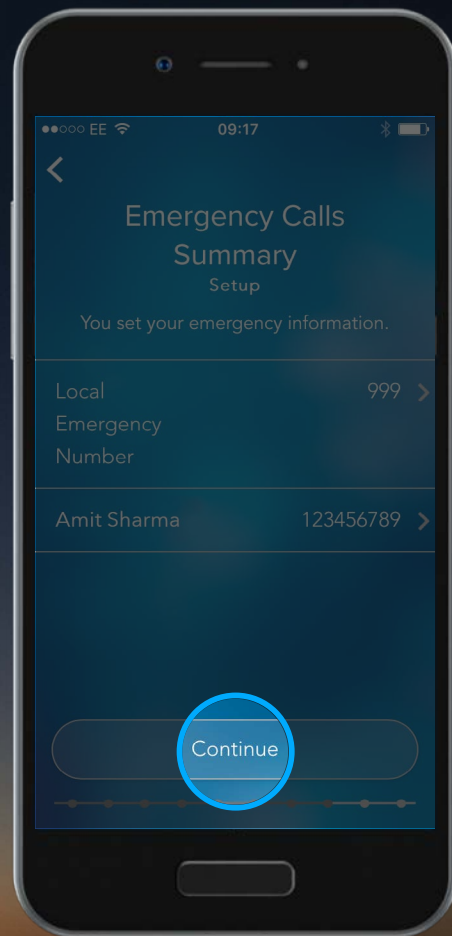


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

22.

Профіль

Щоб допомогти персоналізувати інформацію та покращити загальний досвід, налаштуйте Ваш профіль, обравши **“Налаштувати профіль”**.

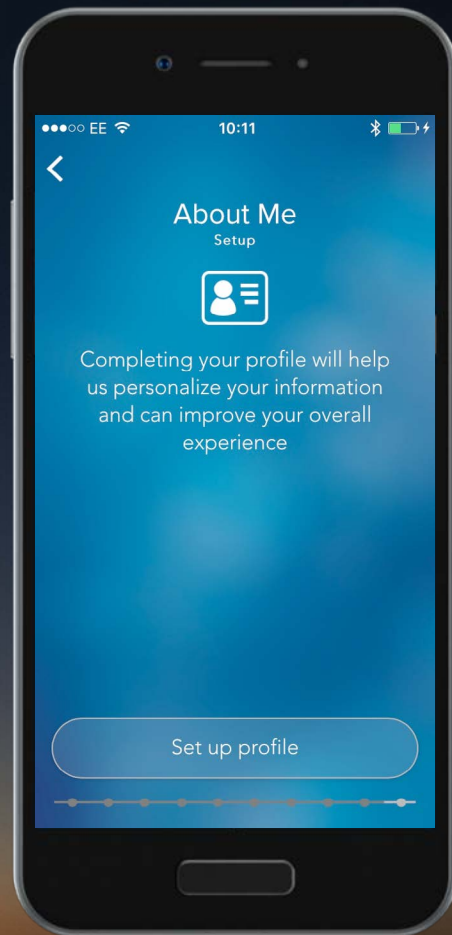

Contour[®]
plus **ONE**»


Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

22.

Профіль

Щоб допомогти персоналізувати інформацію та покращити загальний досвід, налаштуйте Ваш профіль, обравши **“Налаштувати профіль”**.

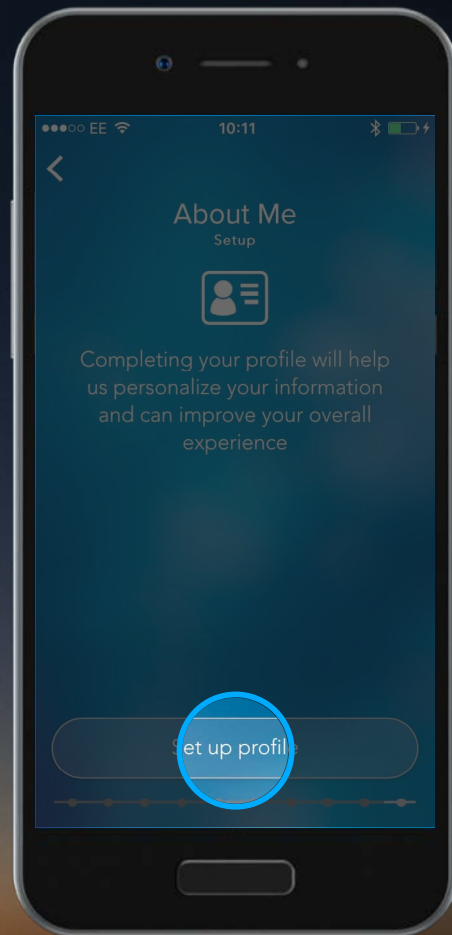

Contour[®]
plus **ONE**


Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

23.

Профіль

Введіть Вашу дату народження,
потягнувши дати вверх та вниз, та оберіть
“Продовжити”.

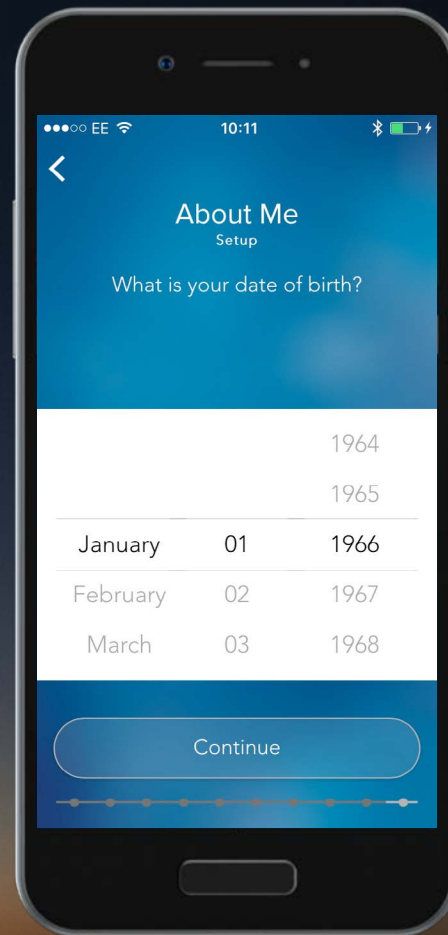


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
різень глюкози в крові

23.

Профіль

Введіть Вашу дату народження,
потягнувши дати вверх та вниз, та оберіть
“Продовжити”.

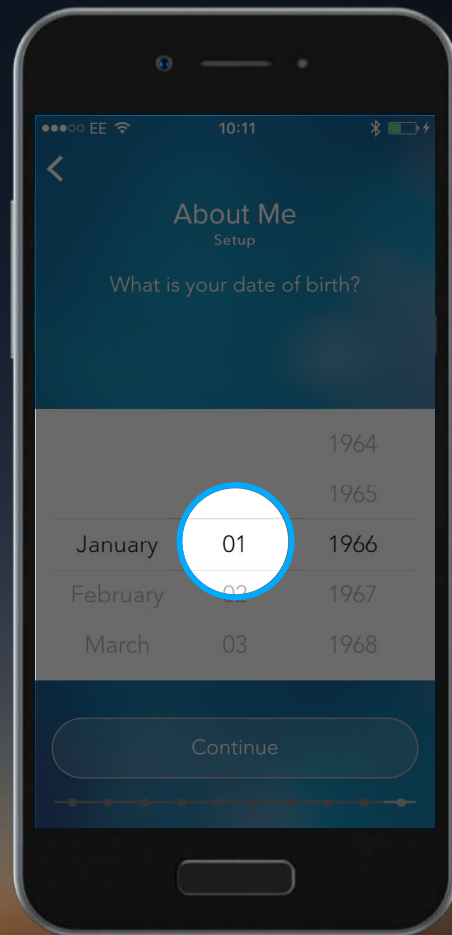


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
різень глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

23.

Профіль

Введіть Вашу дату народження,
потягнувши дати вверх та вниз, та оберіть
“Продовжити”.

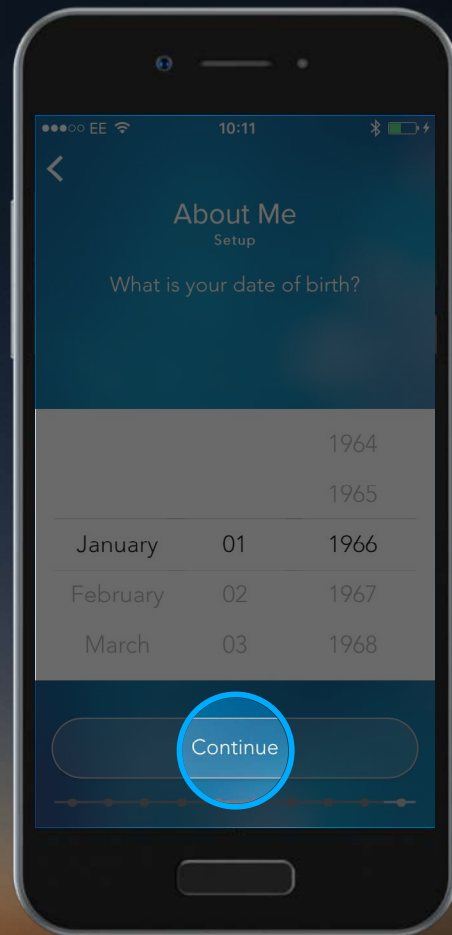


Contour
plus **ONE**
Система вимірювання
різень глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

24.

Профіль

Оберіть Вашу стать, та оберіть
“Продовжити”.

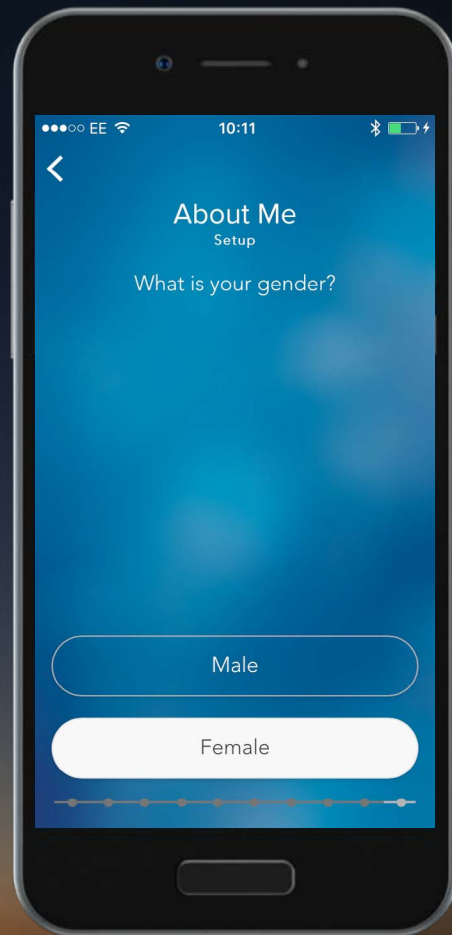

Contour[®]
plus **ONE**


Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

24.

Профіль

Оберіть Вашу стать, та оберіть
“Продовжити”.

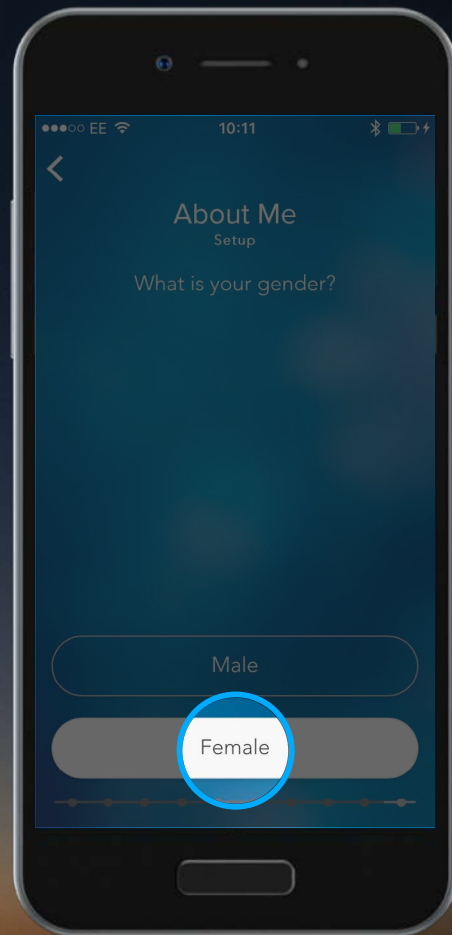

Contour[®]
plus **ONE**


Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

25.

Профіль

Оберіть Ваш тип діабету.

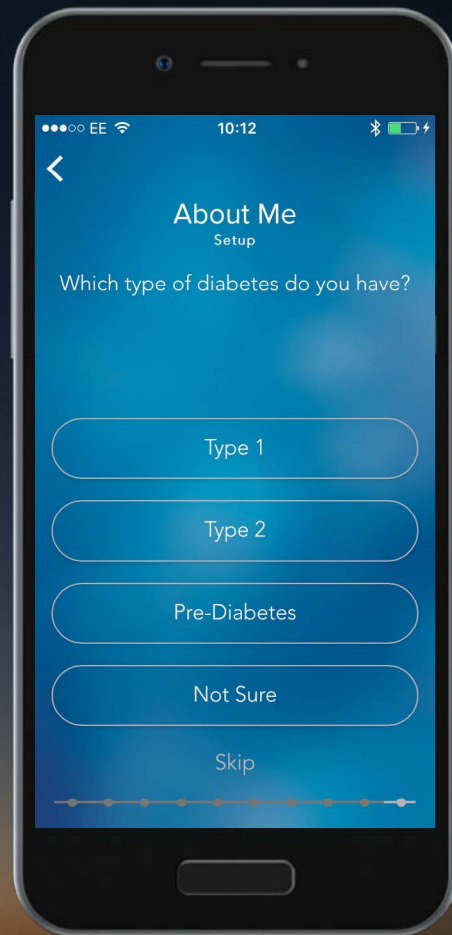

Contour[®]
plus **ONE**»


Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

25.

Профіль

Оберіть Ваш тип діабету.

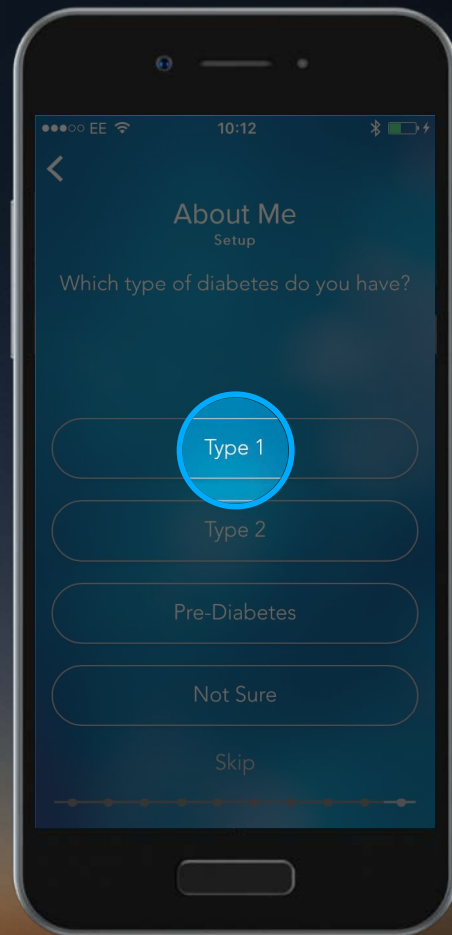

Contour[®]
plus **ONE**»


Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

26.

Профіль

Оберіть Вашу теперішню схему лікування.

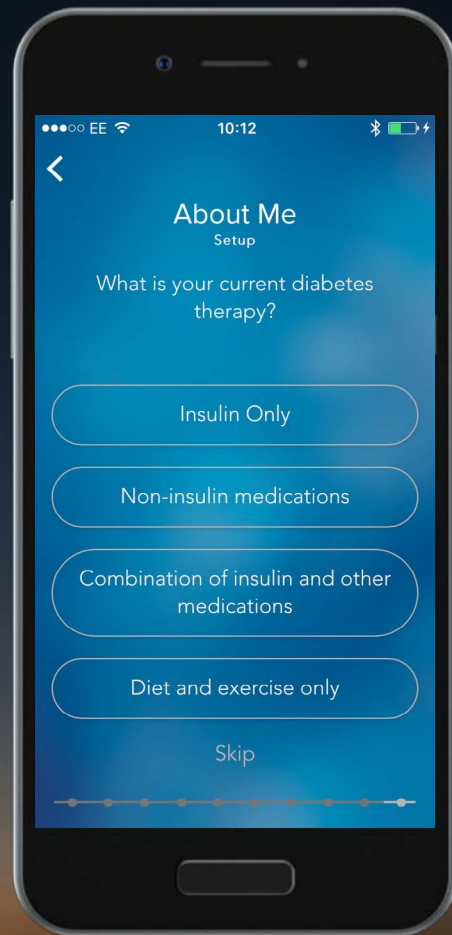


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

26.

Профіль

Оберіть Вашу теперішню схему лікування.

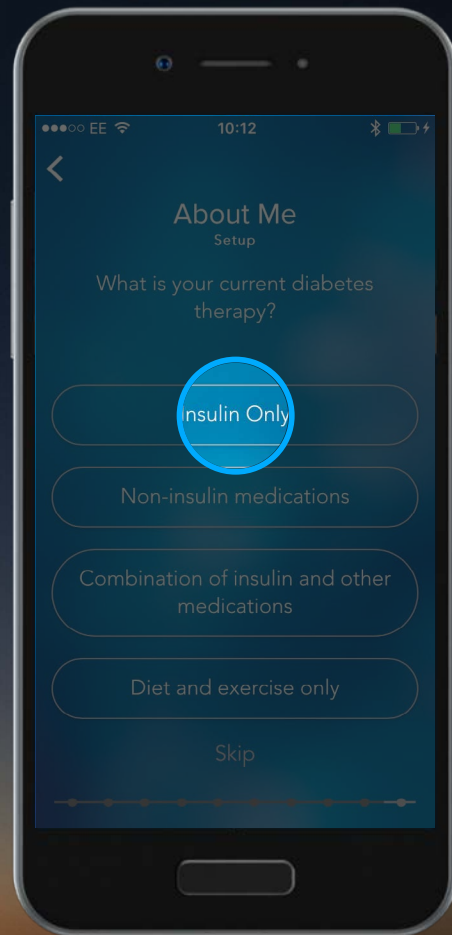

Contour[®]
plus **ONE**»


Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

27.

Профіль

Ваш Профіль тепер завершено, оберіть
“Продовжити”

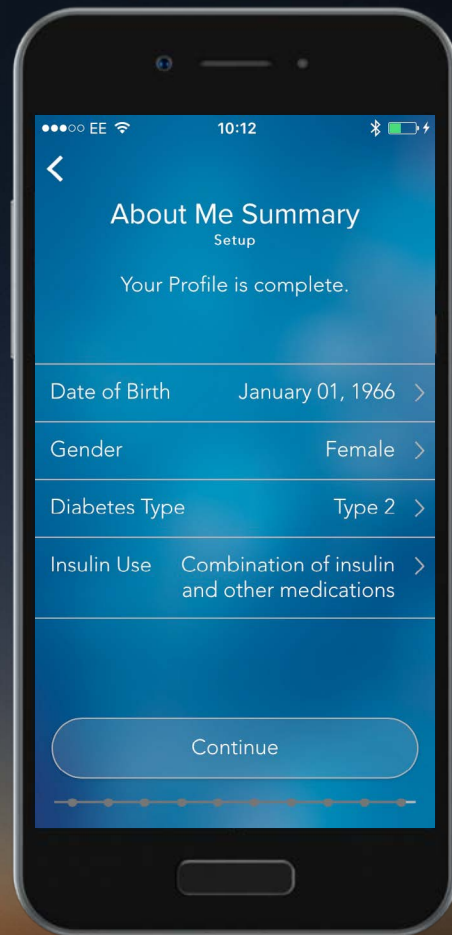


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

27.

Профіль

Ваш Профіль тепер завершено, оберіть
“Продовжити”

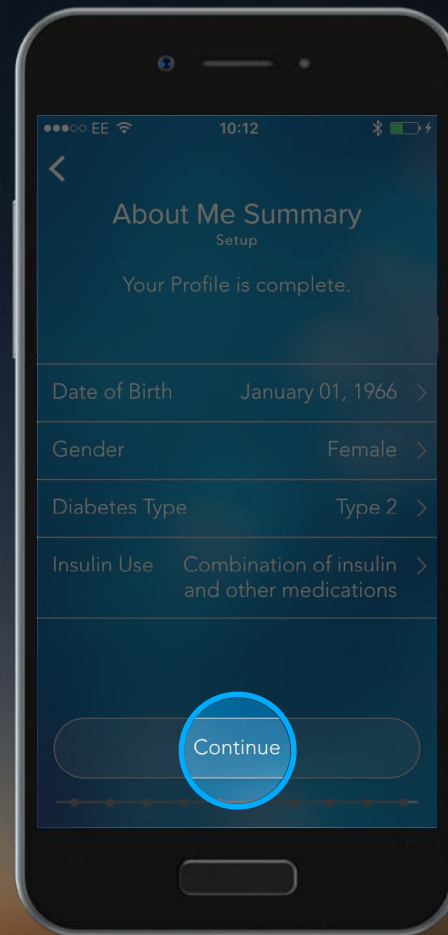


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

28.

Встановлення завершено.

Встановлення Вашого **додатку**
CONTOUR® DIABETES тепер завершено.

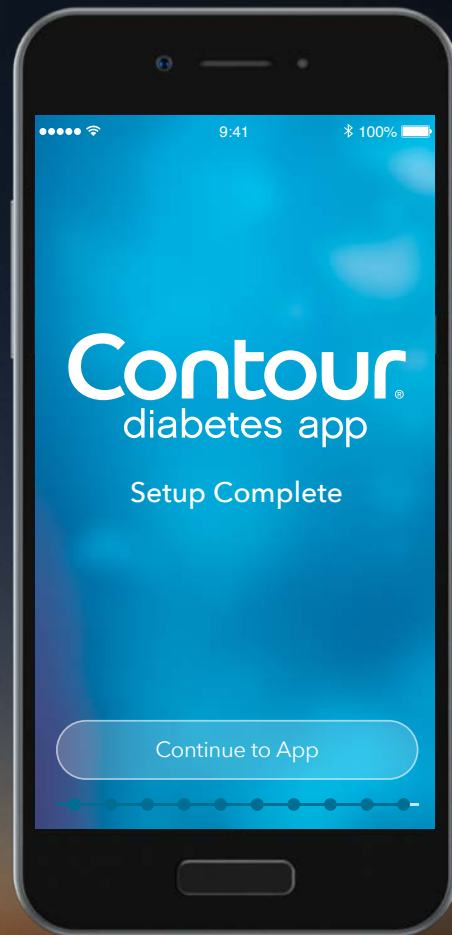


Contour
plus ONE
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

29.

Налаштування.

Ви можете змінити будь-які ці налаштування, обравши **“Налаштування”** з головного меню.

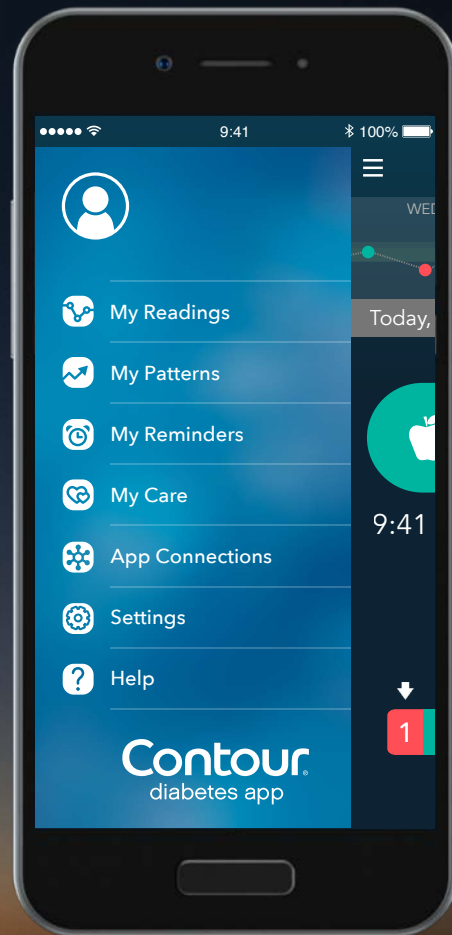


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

29.

Settings

Jebkuru no šiem uzstādījumiem Jūs varat izmainīt, nospiežot uz **“Settings”**, kas atrodas galvenajā izvēlnē.

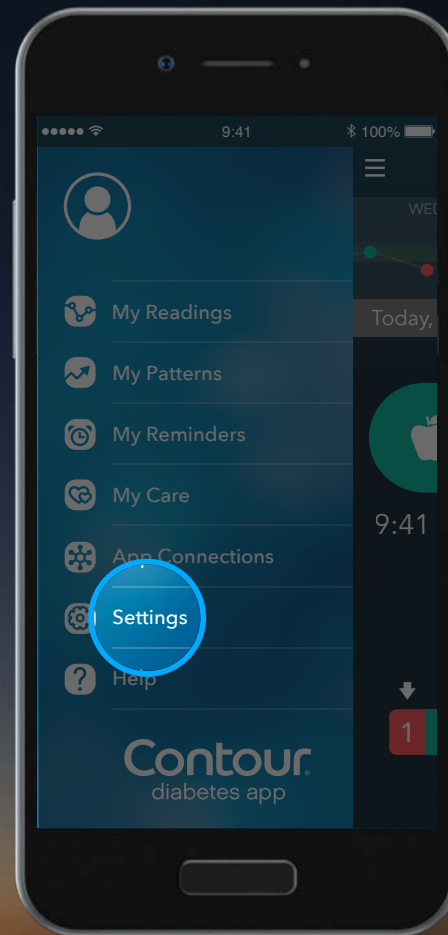


Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

29.

Налаштування.

З меню “**Налаштування**” ви можете побачити та змінити деталі щодо Вашого Глюкометра, Облікового Запису, Цільових Діапазонів, Дільників Дня та інші.

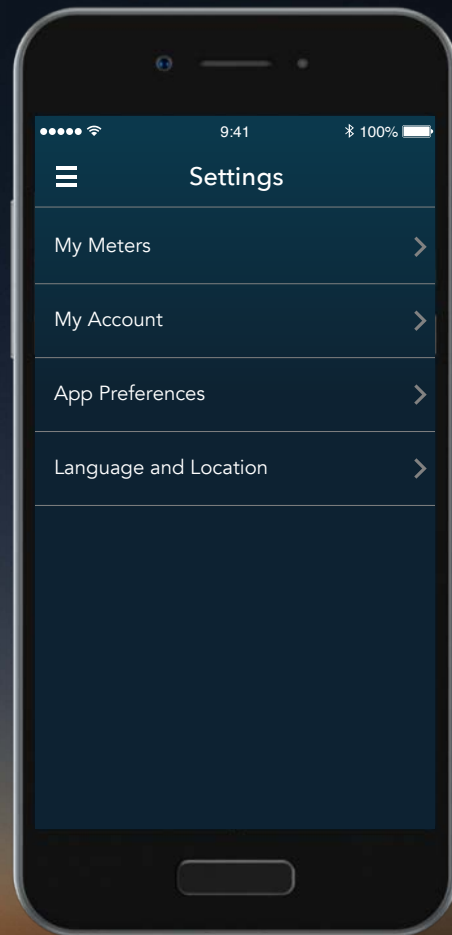

Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

Поговоріть з Вашим лікарем та зверніться до посібника користувача, якщо у Вас є питання про глюкометр **CONTOUR®PLUS ONE** або **додаток CONTOUR®DIABETES**.

Щоб отримати більше інформації та дізнатись, чи доступні ці продукти у Вашій країні, завітайте на diabetes.ascensia.com.



Завжди консультуйтеся з Вашим лікарем до того, як змінювати лікування, дієту або фізичну активність.

Get the app




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks herein is under license. Google play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo and Contour are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Date of preparation: February 2018 code: G.DC.12.2017.52590

© Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG

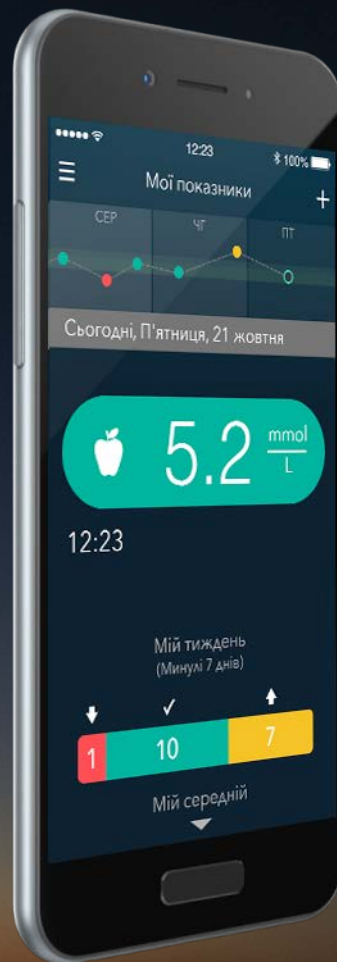

**Contour
plus ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

