




Contour[®] plus ONE»

Система вимірювання
рівня глюкози в крові

Використання функції
Вогники Цільових Діапазонів
у розумному глюкометрі
CONTOUR®PLUS ONE

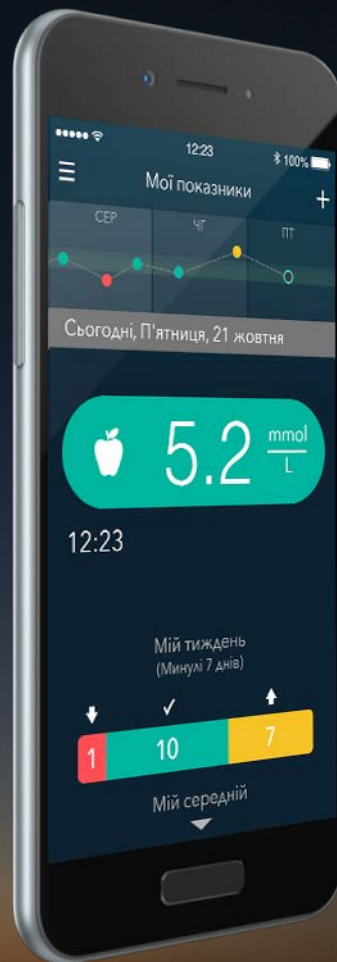

Завжди консультуйтеся з Вашим лікарем до того, як змінювати лікування, дієту або фізичну активність.

Функція **Вогники Цільових
Діапазонів** надає миттєвий
зворотній зв'язок щодо Ваших
результатів.



Contour[®]
plus **ONE**[»]
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

1.

Функція Вогники Цільових Діапазонів

Після проведення тесту рівня глюкози в крові, та якщо Світло Цільових Діапазонів увімкнено у налаштуваннях, порт для тест-смужки показує колір, що представляє Ваш результат у порівнянні до Цільових Діапазонів “До їжі”, “Після їжі” та “Загальний”.



Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

2.

Функція Вогники Цільових Діапазонів

Якщо Ваш рівень глюкози в крові у цільовому діапазоні, світло зелене та глюкометр видає звуковий сигнал.

У діапазоні.



Contour[®]
plus ONE[»]
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

3.

Функція Вогники Цільових Діапазонів

Якщо Ваш рівень глюкози в крові нижче цільового діапазону, світло червоне та глюкометр видає звуковий сигнал.

Нижче діапазону.



Contour[®]
plus ONE[»]
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

4.

Функція Вогники Цільових Діапазонів

Якщо Ваш рівень глюкози в крові вище цільового діапазону, світло жовте та глюкометр видає звуковий сигнал.

Вище діапазону.



Contour[®]
plus **ONE**[»]
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

5.

Функція Вогники Цільових Діапазонів

Якщо Ви не обрали Маркер Їжі, функція Вогники Цільових Діапазонів буде показувати Ваш рівень глюкози в крові у порівнянні до Загального Цільового Діапазону.



Contour[®]
plus **ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

Поговоріть з Вашим лікарем та зверніться до посібника користувача, якщо у Вас є питання про глюкометр **CONTOUR®PLUS ONE** або **додаток CONTOUR®DIABETES**.

Щоб отримати більше інформації та дізнатись, чи доступні ці продукти у Вашій країні, завітайте на diabetes.ascensia.com.



Завжди консультуйтеся з Вашим лікарем до того, як змінювати лікування, дієту або фізичну активність.

Get the app




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks herein is under license. Google play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo and Contour are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Date of preparation: February 2018 code: G.DC.12.2017.52593

© Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG

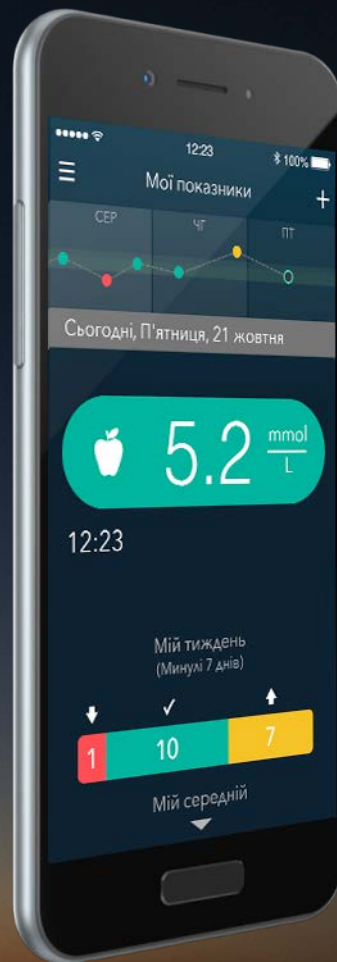

**Contour
plus ONE**
Система вимірювання
рівня глюкози в крові

diabetes.ascensia.com

